



CERECARE
780, rue Blaise Pascal
59267 PROVILLE
☎ +33(0)3 27 83 69 57
☎ +33(0)3 27 83 70 42
🌐 www.cerecare.fr
✉ info@cerecare.fr

Silikona pārsienamais materiāls un gels CEREDERM®

KAS IR CEREDERM®?

CEREDERM® ir neredzams un viegli lietojams pašlīmējošs vai silikona gela pārsienamais materiāls hipertrofisku (sarkanas krāsas apvidus) un keloīdu (šķiedrainu, stingru un biezu izvirzītu) rētu ārstēšanai un novēršanai.

Silikona pārsienamais materiāls mīkstina rētu un samazina tā apsārtumu. Pašlīmējošā pārsienamā materiāla mehāniskā iedarbība izlīdzina rētu un samazina to attīstību. To daļējais oklūzijas efekts uzlabo rētas izskatu. Pārsienamais materiāls vai gels jālieto tad, kad ir noņemtas šuves, un, kad rēta ir pilnīgi sausa, nelietojiet to uz vaļējām brūcēm.

Visas mūsu CEREDERM® pārsienamā materiāla sastāvdaļas ir rūpīgi izvēlētas to bioloģiskās savietojamības dēļ. CEREDERM® nav sterils un paredzēts tikai personīgai lietošanai (lietošanai vienam pacientam). CEREDERM® nav UV staru aizsardzība.

SILIKONA DARBĪBAS MEHĀNISMS UN EFEKTIVITĀTE

Silikons ir standarta procedūra rētu ārstēšanai, jo tas ietekmē rētas mitrināšanu. Tā darbības mehānisms ļauj gan atjaunot ādas kolagēna šķiedras, gan pārveidot audus, lai izlīdzinātu apjomīgās rētas.

Silikons rētu gadījumā mazina iekaisumu un aktivizē dabisko dzišanas procesu. Turklāt, silikons nomierina rētas niezi un savelkošo sajūtu, pateicoties tā raksturīgajai mīkstinošajai darbībai, kā arī tā radītajai ādas virspusējai mitrināšanai.

Silikons, kas ir daļēji okluzīvs, ļauj saglabāt pietiekami daudz ūdens tvaiku, ko izdala āda, kas mazinātu asins piegādi un kolagēna nogulsnešanos. Organisms izmanto tieši šo kolagēnu, lai atjaunotu dziļos ādas bojājumus. Ūdens tvaiku aizture notiek, pateicoties poliuretāna slānim, kas veicina rētu mīkstināšanu un balināšanu. Silikons ir tieši tur, lai nodrošinātu pārsienamā materiāla saķeri un tā pārvietošanās funkciju.

Saskaņā ar zinātniskās literatūras pārskatu rētu apstrāde ar silikona gelu ir efektīva. Ārstēšana ilgst apmēram 4 mēnešus (šis ārstēšanas periods var atšķirties atkarībā no keloīda izmēra un pacienta).

CEREDERM® silikona pārsienamais materiāls un gels:

- Mazina niezi
- Mīkstina rētu
- Samazina apsārtumu
- Mitrina rētu
- Izlīdzina rētu
- Samazina rētu pēc 2 - 3 lietošanas mēnešiem
- Pielāgojams rētai
- Pilnībā piemērots pacienta morfoloģijai
- Neredzams un nesāpīgs
- Pašlīmējošs (pārsienamais materiāls)

1. GELS



GELA NOTURĪBAS LAIKS

Gela noturības laiks ir 24 stundas ar uzklāšanu 2 reizes dienā (no rīta un vakarā) zem drēbēm un berzes zonām.

INDIKĀCIJAS

- Redzamās vietas (seja, kakla līnija)
- Fleksijas krokas
- Matainās vietas
- Pēc dažām krūšu operācijām (paduses dobumā)
- Maziem bērniem (pediātriskā ķirurģija): nepastāv risks, ka kāds elements varētu atdalīties, un to varētu norīt + labāk bērniem aktivitāšu laikā lietot gelu.
- Pēc matu implantācijas procedūras

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

- Viegli uzklāt
- Daļēji okluzīvs ūdens tvaikiem, nav samirkšanas risks
- Caurspīdīgs
- Neredzams pēc dažām sekundēm
- Ilgstoši noturīgs uz ādas
- Nav taukains, nesmērē drēbes
- Pielāgots visām ķermeņa zonām, tostarp grumbām, izliekuma krokām, matainām zonām un sejai.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

- Apskatiet rētu un vismaz vienu reizi dienā to rūpīgi notīriet ar tīru ūdeni un PH neitrālām ziepēm.
- Pirms gela uzklāšanas pārliedcinieties, ka āda ir labi nožuvusi.
- Uzklājiet plānu gela kārtu un ap rētu veiciet apļveida kustības, neļaujot tam iekļūt ādā. Atstājiet to uz dažām minūtēm.
- Pēc lietošanas kārtīgi aizveriet tūbiņu.


Ja gels žūst pārāk ilgi vai, ja tas ir pārāk lipīgs, iespējams, tas ir tāpēc, ka uzklātais slānis ir pārāk biezs.

Ņemot vērā vidējo ārstēšanas ilgumu, kas ir 4 mēneši, 15gramu tūbiņa pilnībā paredzēta rētas apstrādei, kuras izmērs ir mazāks par 10 cm, ja tiek uzklāts plāns slānis (aprēķins veikts ar divām uzklāšanas reizēm dienā). Lūdzu, ņemiet vērā, ka tā kā šī lietošana aprēķināta uz vidējo lietošanu, viena tūbiņa var nebūt pietiekama.

SASTĀVS

Pastiprināti siloksāni (<90%), ūdens, nātrija poliakrilāts, glikola ēteris, silikona glikola kopolimērs.

2. PĀRSIENAMAIS MATERIĀLS

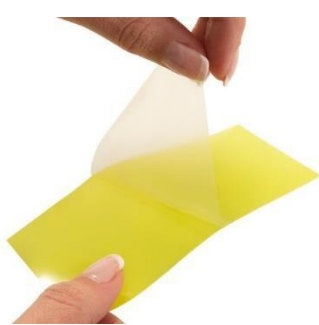

INDIKĀCIJAS

Katru pārsienamo materiālu var sagriezt vajadzīgajā formātā atkarībā no pārklājamās rētas lieluma:

- Maza apmatojuma un plakanas vietas (vēdera priekšējā siena, vēdera laparotomija, ķeizargrieziena daļa, sternotomija, krūšu kurvis)
- Pēc krūšu operācijas (ANCHOR un CROWN pārsiešanas materiāls): krūšu rekonstrukcija, samazināšana, palielināšana, mastektomija
- Apdegums, kad nav čūla vai sulošanās
- Tetovējuma noņemšanas rēta

Pārsienamā materiāla lietošanas instrukcija

CEREDERM® silikona pārsienamo materiālu var izmantot hipertrofisku (sarkanā krāsā apvidū) un keloīdu (šķiedru, stingru un biezu izspiestu) rētu ārstēšanai un profilaksei. Turklāt tie jāuzglabā un jāpārvadā to kastītē. Lai to lietotu, Jums jāievēro šie precīzie norādījumi:

- Pārbaudiet rētu un vismaz vienu reizi dienā to rūpīgi notīriet ar tīru ūdeni un neitrālām PH ziepēm.
- Pirms pārsienamā materiāla uzklāšanas pārlicinieties, ka āda ir labi nožuvusi.
- Izņemiet pārsienamo materiālu no iepakojuma. Ja nepieciešams, sagrieziet pārsienamo materiālu vajadzīgajā izmērā un formā, lai pārklātu rētu. Griežot, noteikti atstājiet 1 cm rētas katrā pusē.
- Uzlieciet pārsienamā materiāla pašlīmējošo pusi uz aizvērtās brūces un uzmanīgi noņemiet aizsargplēvi.

CEREDERM® silikona pārsienamo materiālu ir iespējams arī izmantot, ja nepieciešami atbalstošie pasākumi (elastīgā josla vai kompresijas apģērbs). CEREDERM® silikona pārsienamo materiālu ieteicams turēt katru dienu, izņemot gadījumus, kad ilgstoši esat saskarē ar ūdeni vai jebkuru šķidrumu.

Katru pārsienamo materiālu var turēt 3 līdz 4 dienas. Pēc šī perioda pārsējs dabiski zaudēs saķeri. Pārsienamo materiālu nedrīkst turēt ilgāk kā 5 dienas.

Kad pārsienamais materiāls vairs nelīp, noņemiet to un uzlieciet jaunu. Ārstēšanai vajadzētu ilgt no 2 līdz 3 mēnešiem.

Vienmēr ievērojiet to, kas rakstīts uz ārsta receptes.

SASTĀVDALAS


100% silikons

PAPILDU INFORMĀCIJA

Lietošanas zonas

	CEREDERM® 5x8 cm	CEREDERM® 5x30 cm	CEREDERM® 10x20 cm	CEREDERM® Anchor	CEREDERM® Ring	CEREDERM® Lipostick
HIPERTROFISKU RĒTU ĀRSTĒŠANA UN NOVĒRŠANA	X	X	X	X	X	X
KELOĪDU RĒTU ĀRSTĒŠANA UN NOVĒRŠANA	X	X	X	X	X	X
RĒTU ĀRSTĒŠANA PĒC SKAISTUMKOPŠANAS ABLĀCIJAS PROCEDŪRĀM VAI LIPOSAKCIJAS						X
FORMA, KAS PIELĀGOJAS PERI-AREOLĀRĀM RĒTĀM					X	
FORMA, KAS PIELĀGOJAS KRŪŠU SAMAZINĀŠANAS VAI KRŪŠU PTOZES KOREKCIJAS GADĪJUMĀ				X		
FORMA, KAS PIELĀGOJAS DAŽĀDIEM RĒTU IZMĒRIEM	X	X	X	X		

IN 6 SELF-ADHESIVE SHAPES (BOX OF 10)

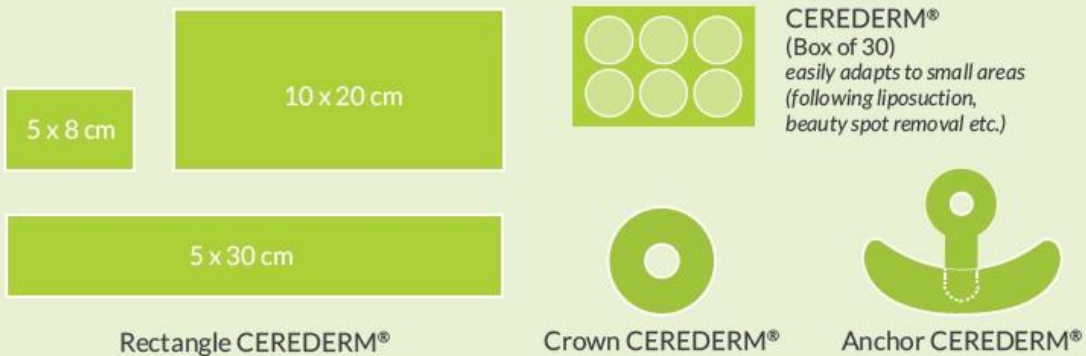

AS A GEL

15g tube
and 50g tube



Kontrindikācijas

CEREDERM® silikona pārsienamo materiālu un gelu nevar lietot šādos gadījumos:

- Atvērta brūce
- Čūla
- Izgulējums (spiediena čūla)
- Sulošanās
- Nesadzījis apdegums
- Gļotāda
- Vietas, kas atrodas tuvu acīm
- Ja rodas ādas reakcija, pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar ārstu.

CEREDERM® paredzēts tikai ārīgai lietošanai.

Uzglabāriet CEREDERM® bērniem nepieejamā vietā.

Nelietot CEREDERM® pēc derīguma termiņa beigām (rakstīts uz CEREDERM® iepakojuma)

Blakusparādības

CEREDERM® gela vai pārsienamā materiāla lietošana var izraisīt tādas blakusparādības kā ādas reakcijas (eritēma, nieze utt.), brūces atvēršanās vai sāpes. Atbilstoša lietošanas nosacījumu un kontrindikāciju ievērošana mazina šīs blakusparādības. Blakusparādību gadījumā ieteicams uz laiku pārtraukt CEREDERM® gela vai pārsienamā materiāla lietošanu. Ārstēšanu var atsākt, tiklīdz stāvoklis normalizējas, un ieteicams konsultēties ar ārstu.

Kontrole un izsekojamība

Mūsu produkti tiek ražoti no izejvielām, kas apstiprinātas lietošanai medicīnā un kosmētikā. Izmantotās izejvielas atbilst specifikācijām, kas noteiktas ar piegādātājiem.

Gatavam produktam tiek veikta vizuāla aizzīmogojuma pārbaude.

Pēc partijas numura, mēs varam nodrošināt dažādu ražošanas posmu soļu izsekojamību, lai zinātu gala patērētāju lietotās konkrētās partijas