



Roche Diagnostics

Control – Test M

IN VITRO diagnostikai

Teststrēmeles urīna analizatoru kalibrācijai un optikas pārbaudes veikšanai

Lietošanas pamācība

Sīkāku aparāta kalibrācijas un pārbaudes veikšanas informāciju lūdzu meklējiet aparāta darbības aprakstā.

Sausu stripu ielieciet aparātā. **Stripu nemērciet urīnā!** Stripu var izmantot tikai vienu reizi.

Novērtējums

Stripa analīzes pelēkā analīzes laukuma individuālās kalibrācijas vērtības tiks izdrukātas reflektances % veidā. Šo vērtību interpretāciju lūdzu meklējiet atbilstošā aparāta apraksta nodaļā. Ja iegūtās vērtības novirzās no pieļaujamajām, tad rekomendējam veikt īsas mērījumu sērijas ar vairākiem Control - Test stripiem. Tas lietotājam ļauj novērtēt, vai aparāts nepareizi darbojas, vai tika izmantots netīrs vai bojāts strips.

Lūdzu atcerieties

Turiet stripus tīrus un sausus. Vienmēr turiet tos aizvērtā kārbīnā, nepakļaujiet tiešiem saules stariem. Nelietojiet bojātus vai netīrus stripus. Uzglabājiēt kārbīņu horizontāli temperatūrā, kas nepārsniedz + 30⁰ C. Aizvērtā kārbīnā stripi ir stabili līdz datumam, kas uzrādīts uz etiķetes.

Iepakojums

Paciņā 50 stripi.

Kataloga numurs: RU11379194263.

Izplatītājs

SIA Invitros, Viskaļu iela 11, Rīga, LV 1026, tālr.: 67840380.