

Prontoderm®

MRSA (pret meticilinu noturīgais zeltainais stafilokoks (staphylococcus aureus)) dekontaminācijai un ādas, brūču un gļotādas attīrīšanai



Prontoderm® – MRSA dekontaminācija bez problēmām



MRSA dekontaminācija

Mikrobus iznīcinošais mazgāšanas šķīdums Prontoderm® papildus sinerģētiskajam undecilenamidopropil-betaīna (tenzīda) un poliaminopropilbiguanīda (konservants poliheksanīds) maisījumam satur tikai ūdeni. Poliheksanīds izceļas ar to, ka to ļoti labi panes audi un tam piemīt augsta bioloģiskā saderība. Epikutānie testi apliecina, ka arī ilgstošas lietošanas gadījumā nerodas nekāds ādas kairinājums. Šī iemesla dēļ Vācijas Slimnicu higiēnas sabiedrība iesaka lietot poliheksānu saturošus produktus visa ķermeņa mazgāšanai.

Dokumentācija par Prontoderm®

Pēc pieprasījuma Jūs saņemsiet plašu atsauksmju sarakstu ar norādījumiem par bioloģisko saderību, mikrobioloģiju, klīniskajiem rezultātiem, lietošanas gaitā izdarītajiem novērojumiem, kā arī atsaucēm uz literatūru.

⁽¹⁾ Konsensa ieteikumi par brūču antiseptiku, Brūču dziedēšanas žurnāls (*Zeitschrift für Wundheilung*), Nr. 3, 2004

Undecilenamidopropil-betaīns

- īpaši augstvērtīgs tenzīds
- izcila mazgāšanas efektivitāte
- izcila panesamība uz ādas
- nebojā ādu un gļotādu
- āda un gļotāda neizzūst
- gadu desmitiem ilgi lielās devās ietilpst jutīgai ādai paredzētos ķermeņa kopšanas līdzekļos

Poliheksanīds

- izcila panesamība uz ādas
- āda un gļotāda neizzūst
- nerodas kairinājums

Sakarā ar labo panesamību uz ādas poliheksanīds, piemēram, saskaņā ar konsensa ieteikumiem (2004. gada aprīlis) patlaban ir klasificējams kā „1. šķiras līdzeklis brūču antiseptikai”.⁽¹⁾

Tas nodrošina arī panesamību uz ādas.



MRSA dekontaminācija

Prontoderm® lietošanas norādījumi

1. Matu mazgāšana

Mati pilnībā tiek samitrināti ar Prontoderm® šķīdumā bagātīgi samērcētu drāni, ierīvojot šķīdumu galvas ādā un matos. Iedarbības ilgumam jābūt 3 līdz 5 minūtes. Pēc tam mati tiek kārtīgi izsusināti un galva aptrīta ar tīru dvieli. Beigās matus nepieciešamības gadījumā var izmazgāt arī ar jebkādu šampūnu.

Alternatīva mazgāšanas iespēja – Prontoderm®Foam (putas). Kārtīgi jāiemasa matos un galvas ādā, iedarbības laiks 3 līdz 5 minūtes. Putas nav nepieciešams izmazgāt. Ieteicama izsusināšana ar tīru dvieli.

2. Seja

Seja tiek pamatīgi nomazgāta ar tīru mazgāšanas drāniņu, kas piesūcināta ar Prontoderm® šķīdumu. Mazgāšanas laikā acis jāaizver. Acu kaktiņi un plakstiņi uzmanīgi jānotīra ar to pašu drāniņu. Notīrītās, dekontaminētās ādas zonas jānosusina pēc 1 līdz 2 minūtes ilgas iedarbības.

3. Acis

Asarām parasti ir dezinficējošas funkcijas, tādēļ acis nav uzskatāmas par stafilokokku apdraudētu zonu.

4. Ausis

Ausu gliemežnīcas iekšpuse tiek tīrta ar Q-tipa vates kociņu, kas ir samitrināts ar Prontoderm® šķīdumu. Uzmanību! Vati nedrīkst piesūcināt pārāk slapju, jo Prontoderm® šķīdums tāpat kā jebkurš cits tīršanas šķīdums nedrīkst nonākt auss kanālā.

5. Deguns

Deguns tiek tīrīts ar samitrinātu vates kociņu. Pamatīga deguna tīršana jāveic vairākas reizes dienā, vismaz no rītiem, pusdienlaikā un vakaros, tā, lai neveidotos piekaltušas sekreta paliekas, bet izveidošanās gadījumā tās būtu viegli noņemamas. Tas palīdz iznīcināt barotni jauniem perēkļiem. Pēc tīršanas jālieto gēls Prontoderm® Gel light.

6. Mutes higiēna

Kā lietošanai gatavu mutes skalošanas līdzekli ieteicams lietot ProntOral®.

Lietošana MRSA dekontaminācijai: vismaz 3 x dienā apmēram 1 līdz 2 minūtes jaskalo mute un rīkle, ja iespējams dziļi izskalojot kaklu (atbilstoši RKI direktīvai F 3.3.1).

7. Ķermeņa augšdaļa

Ķermeņa augšdaļa, sākot no kakla, rūpīgi jānomazgā ar tīru, Prontoderm® šķīdumā samērcētu drāniņu un pēc 1 līdz 2 minūtēm jānosusina.

8. Ķermeņa apakšdaļa

Anālās atveres un ģenitāliju zona jāmazgā ar Prontoderm® šķīdumā samērcētu drāniņu. Nepieciešamības gadījumā ķermeņa apakšdaļas mazgāšanai jālieto vairākas drāniņas – līdz pilnīgai nepatīkamu aromātu likvidēšanai.

9. Urīna izvades kanāli un katetru pievienošanas vietas

Horizontālo urīnceļu katetru ievades vietas jātīra ar Prontoderm® šķīdumā samērcētiem, smailiem tamponiem un pēc vienas minūtes jānosusina ar atsevišķu, sausu, tīru, bet nesterilu vates tamponu. Jastrāda virzienā no iekšpuses uz ārpusi.

10. Kājas

Kāju mazgāšana un dekontaminācija notiek analogiski kā ķermeņa augšdaļai. Pēc šiem pasākumiem pacients gultas vidū tiek pagriezts uz sāniem, vecais palags tiek saritināts virzienā no gultas malas uz centru un zem pacienta paklāts jaunais palags. Pēc tam pacients tiek pagriezts normālā stāvoklī uz muguras un analogiski apstrādātas pārējās ķermeņa daļas. Tad pacientu atkal pagriež uz sāniem, izvelk veco palagu un nogludina jauno palagu.

11. Citas daļas, piemēram, brilles, rotaslietas, protēzes

Visu pārējo aprīkojumu, kas ir saskarē ar pacientu, piemēram, brilles, rotaslietas, protēzes u.tml., no ārpuses var noslaucīt ar Prontoderm® šķīdumu. No plastmasas virsmām šķīdums pēc apmēram 5 minūtes ilgas iedarbības jānoskalo ar tīru, siltu krāna ūdeni.

Prontoderm® - drošība

Ādas, gļotādas un matu dekontaminācija MRSA gadījumā

- Bezkrāsams šķīdums antiseptiskai visa ķermeņa mazgāšanai, kopšanai un nepatīkama aromāta novēršanai



- Pārbaudīts saskaņā ar *DGHM* standarta metodēm, Eiropas pārbaudes normām EN 12054 un EN 1499, kā arī testēts attiecībā uz iedarbību pret MRSA
- Pateicoties izcilajai panesamībai uz ādas, to var izmantot arī pacientiem ar pastiprinātu ādas jutīgumu, kā arī lietot ilgstošu laika periodu
- Laika ekonomija – nav nepieciešama noskalošana vai nomazgāšana
- Vannas sagatavošanai ieteicams lietot Prontoderm® koncentrātu

Deguna priekšelpas tīrīšana un MRSA dekontaminācija



- Viegli uzklājams viskozas struktūras gēls
- Izcila panesamība uz gļotādas
- Kopšanai un mitruma uzturēšanai
- Piemērots ilgstošai lietošanai

Ādas tīrīšana, kopšana un MRSA dekontaminācija



- Biezas konsistences gēls
- Ideāli piemērots dušai
- Izcila panesamība uz ādas
- Piemērots ilgstošai lietošanai

Prontoderm® šķīdums

Art. Nr.	Iepakojums	PZN
400 102	1 x 500 ml	4398229
400 100	1 x 5l	4398235

Prontoderm® Gel light

Art. Nr.	Iepakojums	PZN
400 200	1 x 30 ml	4398264

Prontoderm® Gel strong

Art. Nr.	Iepakojums	PZN
400 211	1 x 100 ml	4398258

Prontoderm® koncentrāts

Art. Nr.	Iepakojums	PZN
400 105	1 x 1l	4398241

Prontoderm® MRSA Kit

Art. Nr.	Iepakojums	PZN
400 300	1 komplekts	1048612

1 komplekta sastāvdaļas:

4 x 500 ml Prontoderm® šķīdums
 1 x 250 ml ProntOral®
 1 x 200 ml Prontoderm® Foam
 1 x 30 ml Prontoderm® Gel light
 Informācijas materiāls

MRSA dekontaminācija

Antibakteriālas tīrīšanas putas ar Panthenol



- Antiseptiskai visa ķermeņa tīrīšanai, kopšanai un nepatīkama aromāta novēršanai MRSA gadījumā
- Piemērots arī matu mazgāšanai
- Laika ekonomija – nav nepieciešama noskalošana vai nomazgāšana
- Piemērots ilgstošai lietošanai un īpaši – pacientiem ar gultas režīmu

Prantoderm® Foam

Art. Nr.	Iepakojums	PZN
400 111	1 x 200 ml	4398270

Lietošanai gatavs, mikrobus iznīcinošs mutes skalošanas līdzeklis dekontaminācijai MRSA gadījumā



- Nesatur spirtu, ar patīkamu piparmētru garšu
- Izcila panesamība uz gļotādas
- Piemērots ilgstošai lietošanai
- Īpaši piemērots jutīgas un problemātiskas mutes gļotādas gadījumā
- Atbalstošai kopšanai ar staru terapiju ārstējamiem pacientiem

PrantOral®

Art. Nr.	Iepakojums	PZN
400 700	1 x 250 ml	0795270

Norādījums par produktu

Prontosan® brūču skalošanas šķīdums

Līdzās produktu līnijai Prantoderm® mēs piedāvājam arī šķīdumu brūču skalošanai Prontosan®, kas ietilpst mūsu „Ādas un brūču menedžmenta“ programmā.

Prontosan® izmanto lokālai inficētu, kontaminētu ādas brūču tīrīšanai. Brūci iespējams ātri sadziedēt tikai tad, ja tā tiek efektīvi attīrīta no aplikuma (no atmirušajām šūnām, mikrobiem, nekrozes, izdalījumiem). Nosedzošajam brūces pārsejam pēc veiksmīgas tīrīšanas vai skalošanas tiek nodrošināta optimāla bāze.

Pateicoties sastāvdaļu polihexanīda un undecilēnamidopir opil-betaīna kombinācijai, ar brūču skalošanas šķīduma Prontosan® palīdzību iespējams ātri, dermatoloģiski nekaitīgi un efektīvi attīrīt brūci no aplikuma

Bez tam Prontosan® efektīvi noņem vecu pārseju atliekas, vienlaikus saudzējot audus, un absorbē brūces izdalīto aromātu, kas vienlīdz var traucēt gan pacientiem, viņu piederīgajiem un kopējiem.



EBM 2000plus

MRSA uztriepām ieteicams aprēķina kods 32726, efektivitāte tiek pārbaudīta arī snāčijas laikā vai pēc tās.