

ATBILSTĪBU NODROŠINOŠĀ VIDES VIRSMU DEZINFEKCIJA

Incidin® OxyFoam S & OxyWipe S


Sporicīds, lietošanai gatavs tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis ar ātras iedarbības H₂O₂™.

Inovatīvais Incidin OxyFoam S & Incidin OxyWipe S sastāvs nodrošina ieguvumus, ko sniedz patentētais patentētais (patenta nr. EP1987121) ūdeņraža peroksīda šķīdums ar plaša spektra iedarbību.

Līdzekļiem ir plaša spektra iedarbība pret baktērijām un vīrusiem un, pateicoties straujajam iztvaikošanas ātrumam, uz virsmām nepaliek aktīvās vielas atliekas.

Incidin OxyFoam S & OxyWipe S priekšrocības:

- ▲ Sporicīdas & virucīdas salvetes jebkurai virsmai
- ▲ Ātras iedarbības H₂O₂™
- ▲ Atbilstība EN 16615
- ▲ Lieliska materiālu saderība

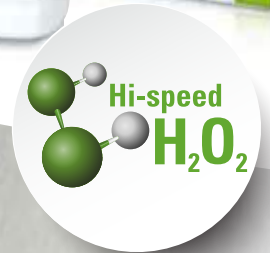

Incidin® OxyFoam S & OxyWipe S

Sporicīds, lietošanai gatavs tīršanas un dezinfekcijas līdzeklis ar ātras iedarbības H₂O₂TM

3 MIN. Sporicīds pret *C.difficile*

2 MIN. Virucīds (TIROS APSTĀKĻOS)

1 MIN. Baktericīds (EN 13727 / 16615)

| | |
|-----------------|--|
| Īpašības | leguvumi |
| EFEKTĪVS | Plašs iedarbības spektrs Īss iedarbības laiks |
| DROŠS | |
| ĒRTS | Vienlaicīgi tīra un dezinficē |

MIKROBIOLOĢISKO UN VIRUSOLOĢISKO TESTU REZULTĀTI

| NEATŠĶĪDĪTA PRODUKTA IEDARBĪBA | OxyFoam S IEDARBĪBAS LAIKS | OxyWipe S IEDARBĪBAS LAIKS |
|--|---|-------------------------------|
| Virsmu dezinfekcija saskaņā ar VAH 2015.gada metodi (iesk. EN 1665), netīri apstākļi | | |
| Baktericīds, levurocīds | 5 min. | 15 min. |
| Fungicīds | 5 min. | 30 min. |
| Mikobaktericīds | 15 min. | 30 min. |
| Testēts saskaņā ar RKI 01/2004* ieteikumiem (netīri apstākļi) | | |
| iedarbība pret apvalkotiemiem vīrusiem sask. ar RKI 01/2004* ieteikumiem | 15 sec. | 30 sec. |
| Adeno* | 30 sec. | 1 min. |
| Poliomas SV40* | 30 sec. | 30 sec. |
| Eiropas standarts (tīri un netīri apstākļi) | | |
| EN 13727 (baktericīds) | 1 min. | 2 min. |
| EN 13624 (levurocīds) | 1 min. | 15 min. |
| EN 13624 (fungicīds) | 5 min. | 30 min. |
| EN 14348 (tuberkulocīds, mikobaktericīds) | 5 min. | 30 min. |
| EN 14476 (virucīds) | 2 min.** / 30 min | 30 min.** |
| EN 14476 Adeno | 30 sec. | 30 sec. |
| EN 14476 Noro | 1 min. (tīros apstākļos) 15 min. (netīros apstākļos) | 15 min. |
| EN 13704 (sporicīds)** | 30 min. | 60 min. |
| EN 13704 (<i>C. difficile</i>)** | 3 min. | 15 min. |
| Eiropas standarts (netīri apstākļi) - 4 lauku tests | | |
| EN 16615 (baktericīds) | 1 min. | 2 min. |
| EN 16615 (levurocīds) | 1 min. | 1 min. |
| EN 16615 (fungicīds) | 5 min. | 5 min. |
| EN 16615 (tuberkulocīds, mikobaktericīds) | 5 min. | 5 min. |
| Sporicīds (metode EN 16615)** | 15 min. | 30 min. |
| <i>C. difficile</i> (metode EN 16615)** | 5 min. | 5 min. |

INCIDIN OXYFOAM S LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



- 1 Apsmidiniet virsmu no apt. 30 cm attāluma.
- 2 Ar drānu izlīdziniet uzsmidzināto līdzekli tā, lai visa apstrādājamā virsma būtu mitra.
- 3 Ļaujiet nožūt.



- 1 Uzsmidziniet līdzekli uz tīras drānas.
- 2 Ar drānu uzklājiet līdzekli tā, lai visa apstrādājamā virsma būtu mitra.
- 3 Ļaujiet nožūt.

* DVV 2008 ** tīros apstākļos

ECOLAB
DEUTSCHLAND GmbH
 Ecolab-Allee 1
 40789 Monheim am Rhein
 Germany
 +49 (0) 2173 599 0
 www.de.ecolab.eu

Ecolab SIA
 Bauskas iela 58a, Rīga,
 LV-1004, Latvija,
 Tel. +371 670 63 770



EFEKTĪVS. DROŠS. ĒRTS.

PIELIETOJUMS

Incidin OxyFoam S: Izsmidzināmas putas medicīnisko ierīču (t.sk., piemēram, zonžu) virsmu un inventāra, un citu virsmu tīršanai un dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs.



Incidin OxyWipe S: Salvētes medicīnisko ierīču (t.sk., piemēram, zonžu) virsmu un inventāra, un citu virsmu tīršanai un dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs.

© BIOZID N-12164

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Incidin OxyFoam S: Apsmidziniet virsmu no apm. 30 cm attāluma vai uzsmidziniet uz tīras drānas. Pārļiecinieties, ka uz ekspozīcijas laiku visa virsma ir pilnīgi samitrināta. Ir pieļaujama arī produkta izsmidzināšana uz salvētes un virsmas tīršana ar to. Pēc tam ļaujiet virsmai nožūt.

Incidin OxyWipe S: Paņemiet vienu salvēti. Bagātīgi samitriniet visu virsmu. Ļaujiet nožūt, nav nepieciešams noskalot. Pārļiecinieties, ka visa virsma ir tikusi samitrināta. Pēc lietošanas cieši aizveriet iepakojuma vāciņu. Nav paredzēts invazīvo medicīnas ierīču dezinfekcijai. Nelietot uz virsmām, kas jutīgas pret oksidētājiem, piem., uz marmora, vara vai misiņa.

SATĀVDAĻAS

100 g satur: Incidin OxyFoam S: 1.5g Ūdeņraža peroksīda
 Incidin OxyWipe S: 1.0g Ūdeņraža peroksīda
 LV28122015/8716

INFORMĀCIJA PASŪTĪTĀJIEM

| PRODUKTS | IĒPAKOJUMA LIELUMS | PASŪTĪJUMA KODS |
|-------------------|--------------------|-----------------|
| Incidin OxyFoam S | 6 x 750ml | 3082060 |
| Incidin OxyWipe S | 6 x 100 salvētes | 3082240 |

UZGLABĀŠANA

Uzglabājiet produktu oriģinālajā iepakojumā, temperatūrā, kas zemāka par 25°C vēsā, sausā vietā. Sargājiet no tiešas saules gaismas ietekmes. Glabāšanas laiks pēc pirmās atvēršanas: Incidin OxyFoam S: līdz norādītā derīguma termiņa beigām
 Incidin OxyWipe S: 1 mēnesis

LIETOJIET BIOCĪDUS UZMANĪGI. PIRMS LIETOŠANAS VIENMĒR IZLASIET ETIKĒTI UN INFORMĀCIJU PAR BIOCĪDU. TĪKAI PROFESIONĀLAI LIETOŠANAI.