



ĀTRĀ DEZINFEKCIJA AR ALKOHOLU

Incidin™ Liquid

GATAVS LIETOŠANAI VIRSMU DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS UZ ALKOHOLA BĀZES

Piedāvā augstu uzticamību lietotājam, pateicoties plašajam efektivitātes spektram, ieskaitot TBC un Noro vīrusu

Incidin Liquid nodrošina:

- Īsu kontakta laiku
- Bez krāsvielām un smaržvielām
- Laba materiālu saderība ar alkohola izturīgām virsmām
- Saderīga ar Incidin sauso salvešu sistēmu



Incidin™ Liquid

Gatavs lietošanai virsmu dezinfekcijas līdzeklis
uz alkohola bāzes



Incidin Liquid
650 ml pudele



Incidin Liquid
1 L pudele



Incidin Liquid
5 L kanna

PLAŠS EFEKTIVITĀTES SPEKTRS ĪSĀ KONTAKTA LAIKĀ

Pateicoties plašam efektivitātes spektram īsā kontakta laikā, Incidin Liquid ir ideāli piemērots intensīvās terapijas un citu augsta riska zonās. Detalizētāks kontakta laiks ir zemāk esošajā tabulā.

UZTICAMS LIETOŠANĀ

Būdam lietošanai gatavs ar pārbaudītu materiālu saderību uz alkohola izturīgām virsmām, Incidin Liquid nodrošina drošu lietošanu piedāvātajās pielietojuma jomās.

BEZ KRĀSVIELĀM UN SMARŽVIELĀM

Bez krāsvielām un smaržvielām, neatstāj aktīvo vielu atliekas uz virsmām un nodrošina ērtu produkta lietošanu.

MIKROBIOLOĢISKO UN VIROLOĢISKO TESTU REZULTĀTI

EFEKTIVITĀTE	KONTAKTA LAIKS
Virsmu dezinfekcija atbilstoši uz VAH ar / bez mehāniskas iedarbības (baktericīds, pretraugu, tuberkulocīds Mycobact.avium, Mycobact. terrae)	5 min
Ātrā virsmas dezinfekcija atbilstoši VAH metodei 2015 bez mehāniskas iedarbības	1 min
EN 13727 / EN 13624 / EN 14348 (baktericīds, (MRSA), pretsēnīšu, tuberkulocīds)	1 min
EN 16615 baktericīds/pretraugu	1 min
EN 16615 (metode) tuberkulocidāls	1 min
RKI-DVV 01/2004 * / EN 14476 apvalkotie vīrusi (HBV, HCV, HIV)	30 sek
DVV 2015 * / EN 14476 ierobežota spektra vīrucīds	10 min
EN 14476 Adeno	1 min
EN 14476 Noro	10 min
DVV 2015* / EN 14476 (tīri nosacījumi) Rota	30 sek
EN 16777 Noro (netīri nosacījumi)	10 min
EN 16777 Adeno (netīri nosacījumi)	5 min
EN 16777 Vaccinia (netīri nosacījumi)	1 min

*DVV 2015 (suspensijas tests)

PASŪTĪŠANAS INFORMĀCIJA

PRODUKTS	IEPAKOJUMS	PASŪTĪŠANAS KODS
Incidin Liquid pudele	12 x 650 ml	3096170
Incidin Liquid pudele	12 x 1 L	3096100
Incidin Liquid kanna	2 x 5 L	3096190

PIELIETOŠANAS JOMA

Ātras iedarbības, gatavs lietošanai virsmu dezinfekcijas līdzeklis medicīnas ierīcēm.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Ar neatšķaidītu produktu samitriniet neausta auduma salveti un noslaukiet spirta izturīgo virsmu. Vai apsmidziniet virsmu no apm. 30 cm attāluma (maks. 40 ml / m²) un ļaujiet nožūt. Pārliecinieties, ka visa virsma ir pilnīgi mitra.

SASTĀVS

100g šķīduma satur
aktīvās vielas:
35g 2-propanola,
25g 1-propanola

UZGLABĀŠANA

Produkts jāuzglabā oriģinālajā traukā, temperatūrā līdz 25 ° C vēsā, sausā vietā, ne tiešos saules staros.

MEDICĪNAS IERĪCI LIETOT DROŠI

Lūdzu, izlasiet etiķeti un informāciju par produktu.



TIKAI PROFESIONĀLAI LIETOŠANAI.

Izplatītājs:
SIA "MEDILINK"
Višķu iela 2k-1,
Rīga, LV-1063,
Latvija



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany



www.ecolab.com