

ĪPAŠA DROŠĪBA VISU VEIDU VIRSMĀM

Incidin® Plus

Virsmu dezinfekcija ar Glucoprotamin®, bez aldehīdiem un četrreizvietotajiem organiskajiem savienojumiem.

Plaša spektra iedarbības baktericīds (iesk. MRSA, TB) un raugiem.

Augsta dezinfekcijas drošība visām mazgājamajām virsmām, pat augsta riska zonās.

- ▶ Patentēts ar Glucoprotamin® aktīvo vielu
- ▶ Plašs spektrs un lieliska tīrīšanas veiktspēja.
- ▶ Iekļauts VAH un RKI sarakstos.



Glucoprotamin®

Incidin® Plus

Virsmu dezinfekcija ar Glucoprotamin®, bez aldehīdiem un četraizvietotajiem organiskajiem savienojumiem.

Mūsu sasniegumi	Jūsu ieguvumi
Uz patentētas aktīvās vielas Glucoprotamin® pamata.	Optimāla dezinfekcija un tīrīšana kombinācijā ar pilnīgu bioloģiskās noārdīšanās spēju
Augsta materiālu savietojamība	Piemērots visiem virsmu un grīdu veidiem

IEDARBĪBA	KONCENTRĀCIJA		EKSPOZĪCIJAS LAIKS (min.)
	%	ml/L	
VAH saraksts (baktericīds, levurocīds)			
Virsmu dezinfekcija atbilstoši VAH, tirot mehāniski, tīros un netīros apstākļos	2 1 0,5 0,25	20 10 5 2,5	15 30 60 240
RKI saraksts			
Virsmu dezinfekcijas joma A	8	80	360
IHO virucīdo dezinfekcijas līdzekļu saraksts			
Tests atbilstoši DWV vadlīnijam ar / bez proteīnu slodzes			
Ierobežota spektra virucīds* (ietver HIV, HBV, HCV)	0,25/ 0,5	2,5 / 5	60 / 15
Rota vīruss	0,5	5	15
Adenovīruss	1	10	60
Papova / Poliomas vīruss SV40	0,5 / 1	5 / 10	60 / 30
Eiropas standarti			
EN 1276 (baktericīds netīros apstākļos)	0,25	2,5	5
EN 13697 (baktericīds tīros / netīros apstākļos)	0,25	2,5	5
EN 13697 (levurocīds tīros / netīros apstākļos)	0,25	2,5	15
EN 1650 (levurocīds)	0,25	2,5	15
Papildus iedarbība			
TBC **	0,25 / 0,5 / 1	2,5 / 5 / 10	60 / 30 / 15
MRSA	0,5	5	60
Gripas vīrusi (H1N1, A / H5N1)***	0,5	5	15
Tuberkulocīds + Mikrobaktericīds ****	1,5 / 3	15 / 30	60 / 30

* saskaņā ar Roberta Koha institūta (RKI) vadlīnijām 1/2004 ** Mycobacterium terrae suspensijas tests (DGHM 1996)
*** ierobežota virucīda aktivitāte **** virsmas testēšana gem. DGHM 2001



Medicīnas ierīču virsmu dezinfekcijai

CE 0297



Šķidrums dezinfekcijas līdzekļa koncentrāts visu veidu virsmu dezinfekcijai.

Biocīda inventarizācijas nr LV: 28032007/3311

PIELIETOJUMS

Sagatavojiet darba šķīdumu, atšķaidot ar ūdeni (maks. 30 °C) vēlamajā koncentrācijā.

Dezinficējamo platību notīriet ar samitrinātu drānu. Pievērsiet uzmanību, lai visa virsma kļūtu slapja.

Lietojiet aizsargcimdus!

Lietojiet biocīdus uzmanīgi!

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu.

SASTĀVS

100 g šķīduma satur:
26 g Glucoprotamin®

ATZINUMI

Produkts ir plaši testēts - mikrobioloģiski, virusoloģiski, toksikoloģiski un ekoloģiski.

Pēc Jūsu pieprasījuma, mēs labprāt sniegsim Jums testēšanas atzinumus.

INFORMĀCIJA PASŪTĪJUMIEM

Produkts	Iepakojuma tilpums	Kods pasūtījumiem
Incidin® Plus Rezerves iepakojums	3 x 2 l	30 548 70
Incidin® Plus Kannna	6 l	30 549 20