

# ATBILSTĪBU NODROŠINOŠĀ VIDES VIRSMU DEZINFEKCIJA

## Incidin® OxyFoam S & OxyWipe S


Sporicīds, lietošanai gatavs tīršanas un dezinfekcijas līdzeklis ar ātras iedarbības  $H_2O_2$ ™.

Inovatīvais Incidin OxyFoam S & Incidin OxyWipe S sastāvs nodrošina ieguvumus, ko sniedz patentētais patentētais (patenta nr. EP1987121) ūdeņraža peroksīda šķīdums ar plaša spektra iedarbību.

Līdzekļiem ir plaša spektra iedarbība pret baktērijām un vīrusiem un, pateicoties straujajam iztvaikošanas ātrumam, uz virsmām nepaliek aktīvās vielas atliekas.

Incidin OxyFoam S & OxyWipe S priekšrocības:

- ▲ Sporicīdas & virucīdas salvetes jebkurai virsmai
- ▲ Ātras iedarbības  $H_2O_2$ ™
- ▲ Atbilstība EN 16615
- ▲ Lieliska materiālu saderība

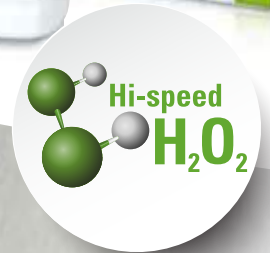

# Incidin® OxyFoam S & OxyWipe S

Sporicīds, lietošanai gatavs tīršanas un dezinfekcijas līdzeklis ar ātras iedarbības H<sub>2</sub>O<sub>2</sub><sup>TM</sup>

**3 MIN.** Sporicīds pret *C.difficile*

**2 MIN.** Virucīds (TIROS APSTĀKĻOS)

**1 MIN.** Baktericīds (EN 13727 / 16615)

<b>Īpašības</b>	<b>leguvumi</b>
<b>EFEKTĪVS</b>	Plašs iedarbības spektrs Īss iedarbības laiks
<b>DROŠS</b>	
<b>ĒRTS</b>	Vienlaicīgi tīra un dezinficē

## MIKROBIOLOĢISKO UN VIRUSOLOĢISKO TESTU REZULTĀTI

NEATŠĶĪDĪTA PRODUKTA IEDARBĪBA	OxyFoam S IEDARBĪBAS LAIKS	OxyWipe S IEDARBĪBAS LAIKS
Virsmu dezinfekcija saskaņā ar VAH 2015.gada metodi (iesk. EN 1665), netīri apstākļi		
Baktericīds, levurocīds	5 min.	15 min.
Fungicīds	5 min.	30 min.
Mikobaktericīds	15 min.	30 min.
Testēts saskaņā ar RKI 01/2004* ieteikumiem (netīri apstākļi)		
Iedarbība pret apvalkotiem vīrusiem sask. ar RKI 01/2004* (HIV,HBV,HCV)	15 sec.	30 sec.
Adeno*	30 sec.	1 min.
Poliomas SV40*	30 sec.	30 sec.
Eiropas standarts (tīri un netīri apstākļi)		
EN 13727 (baktericīds)	1 min.	2 min.
EN 13624 (levurocīds)	1 min.	15 min.
EN 13624 (fungicīds)	5 min.	30 min.
EN 14348 (tuberkulocīds, mikobaktericīds)	5 min.	30 min.
EN 14476 (virucīds)	2 min.** / 30 min	30 min.**
EN 14476 Adeno	30 sec.	30 sec.
EN 14476 Noro	1 min. (tīros apstākļos) 15 min. (netīros apstākļos)	15 min.
EN 13704 (sporicīds)**	30 min.	60 min.
EN 13704 ( <i>C. difficile</i> )**	3 min.	15 min.
Eiropas standarts (netīri apstākļi) - 4 lauku tests		
EN 16615 (baktericīds)	1 min.	2 min.
EN 16615 (levurocīds)	1 min.	1 min.
EN 14562(fungicīds)	5 min.	5 min.
EN 16615 (tuberkulocīds, mikobaktericīds)	5 min.	5 min.
Sporicīds (metode EN 16615)**	15 min.	30 min.
Sporicīds <i>C. difficile</i> EN 17126	5 min.	5 min.

\* DVV 2008 \*\* tīros apstākļos

## INCIDIN OXYFOAM S LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



- 1 Apsmidiniet virsmu no apt. 30 cm attāluma.
- 2 Ar drānu izlīdziniet uzsmidzināto līdzekli tā, lai visa apstrādājamā virsma būtu mitra.
- 3 Ļaujiet nožūt.



- 1 Uzsmidziniet līdzekli uz tīras drānas.
- 2 Ar drānu uzklājiet līdzekli tā, lai visa apstrādājamā virsma būtu mitra.
- 3 Ļaujiet nožūt.

**ECOLAB**  
**DEUTSCHLAND GmbH**  
 Ecolab-Allee 1  
 40789 Monheim am Rhein  
 Germany  
 +49 (0) 2173 599 0  
 www.de.ecolab.eu

Ecolab SIA  
 Bauskas iela 58a, Rīga,  
 LV-1004, Latvija,  
 Tel. +371 670 63 770



# EFEKTĪVS. DROŠS. ĒRTS.

## PIELIETOJUMS

**Incidin OxyFoam S:** Izmidzināmās putas medicīnisko ierīču (t.sk., piemēram, zonžu) virsmu un inventāra, un citu virsmu tīršanai un dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs.



© BIOZID N-12164

**Incidin OxyWipe S:** Salvētes medicīnisko ierīču (t.sk., piemēram, zonžu) virsmu un inventāra, un citu virsmu tīršanai un dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs.

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

**Incidin OxyFoam S:** Apsmidziniet virsmu no apm. 30 cm attāluma vai uzsmidziniet uz tīras drānas. Pārļiecinieties, ka uz ekspozīcijas laiku visa virsma ir pilnīgi samitrināta. Ir pieļaujama arī produkta izsmidzināšana uz salvētes un virsmas tīršana ar to. Pēc tam ļaujiet virsmai nožūt.

**Incidin OxyWipe S:** Paņemiet vienu salvēti. Bagātīgi samitriniet visu virsmu. Ļaujiet nožūt, nav nepieciešams noskalot. Pārļiecinieties, ka visa virsma ir tikusi samitrināta. Pēc lietošanas cieši aizveriet iepakojuma vāciņu. Nav paredzēts invazīvo medicīnas ierīču dezinfekcijai. Nelietot uz virsmām, kas jutīgas pret oksidētājiem, piem., uz marmora, vara vai misiņa.

## SATĀVDAĻAS

100 g satur: Incidin OxyFoam S: 1.5g Ūdeņraža peroksīda  
 Incidin OxyWipe S: 1.0g Ūdeņraža peroksīda  
 LV28122015/8716

## INFORMĀCIJA PASŪTĪTĀJIEM

PRODUKTS	Iepakoju- ma lielums	Pasūtīju- ma kods
Incidin OxyFoam S	6 x 750ml	3082060
Incidin OxyWipe S	6 x 100 salvētes	3082240

## UZGLABĀŠANA

Uzglabājiet produktu oriģinālajā iepakojumā, temperatūrā, kas zemāka par 25°C vēsā, sausā vietā. Sargājiet no tiešas saules gaismas ietekmes. Glabāšanas laiks pēc pirmās atvēršanas: Incidin OxyFoam S: līdz norādītā derīguma termiņa beigām  
 Incidin OxyWipe S: 3 mēneši

LIETOJIET BIOCĪDUS UZMANĪGI. PIRMS LIETOŠANAS VIENMĒR IZLASIET ETIKĒTI UN INFORMĀCIJU PAR BIOCĪDU. TĪKAI PROFESIONĀLAI LIETOŠANAI.