

PIEMĒROTS LIETOŠANAI MITRĀS TELPĀS - UZ ČETRAIZVIETOTO AMONIJA SAVIENOJUMU BĀZES

Laudamonium®

Virsmu dezinfekcijai mitrās telpās, atlēta pedas profilaksei un higiēniskai roku un ķermeņa mazgāšanai.

Uzticama un droša dezinfekcija vannām un citai santehnikai.

Piemērots lietošanai slimnīcās un aprūpes centros.

Plašs pielietojums:

- ▶ Atlēta pēdu izraisīto sēnišu profilakses pasākumiem.
- ▶ Higiēniskai roku un ķereņa mazgāšanai.
- ▶ Ķermeņa mazgāšanai un dekontaminācijai no MRSA.
- ▶ Virsmu dezinfekcijai.



Laudamonium®

Virsmu dezinfekcijai mitrās telpās, atlēta pēdas profilaksei un higiēniskai roku un ķermeņa mazgāšanai.

Laba ādas tolerance.

Piemērots atlēta pēdu izraisošās sēnītes (Trichophyton mentagrophytes) profilakses pasākumiem uz ādas un virsmām.

Ar Laudamonium® dezinficē grīdas, kas ir viegli pieejamas basām kājām.

Plaša spektra:

- ▲ Baktericīds (iesk. MRSA)
- ▲ Levurocīds
- ▲ Ierobežotas efektivitātes virucīds* (iesk. HIV, HBV, HCV)
- ▲ Efektīvs pret Papova vīrusu

EFEKTIVITĀTE	KONCENTRĀCIJA		EKSPOZĪCIJAS LAIKS (min.)
	%	ml/L	
Virsmu dezinfekcija atbilstoši VAH			
Virsmu dezinfekcija atbilstoši DGHM			
· Zema slodze	2	20	60
· Augsta slodze	2	20	60
Virucīdo dezinfekcijas līdzekļu saraksts			
Ierobežota spektra virucīds* (iesk. HIV, HBV, HCV)	1	10	5
Efektīvs pret Papova vīrusu	1	10	30
Papildu efektivitāte			
Higiēniska roku un ķermeņa mazgāšana (iesk. MRSA), saskaņā ar EN 1499	1	10	1
Efektīvs pret Trichophyton mentagrophytes (atlēta pēdu izraisošā sēnīte)	1	10	1
Virsmu dezinfekcija atbilstoši DGHM 2001	4	40	15

* Atbilstoši RKI vadlinijām 1/2004 testēts ar BVDV (C hepatīta surogāt-vīruss) un vaccīnīa vīrusu. Rezultāti ļauj secināt par līdzekļa efektivitāti pret citiem apvalkotajiem vīrusiem, piemēram, HIV, HBV.

EFEKTĪVS.
UZTICAMS.
DROŠS.

ATZINUMI

Pēc Jūsu pieprasījuma, mēs labprāt sniegsim Jums testēšanas atzinumus.

SASTĀVS

100 g aktīvās sastāvdaļas satur:
9,99 g benzalkonija hlorīdu.

INFORMĀCIJA PASŪTĪJUMIEM

Produkts	Iepakojums	Produkta kods
Laudamonium * Kanna	6 l	30 549 40
Laudamonium * Kanna	3x2 l	30 417 30

Lietojiet biocīdu uzmanīgi!
Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu.
Biocīda inventarizācijas nr.:
LV: 28032007/3311