

ANIOSPRAY QUICK

Dezinfekcijas
līdzeklis
izsmidzināšanai



- Šķīdums, gatavs izmantošanai
- Veidots uz etanola bāzes
- Plašs darbības spektrs, īss kontakta laiks
- Izzūstot neatstāj pēdas
- Patīkams aromāts
- Bez aldehīda un krāsvielām


INDIKĀCIJAS

Neiegremdējamu un tādu medicīnisko ierīču un virsmu ātrai dezinfekcijai, kuri ir izturīgi pret spirtu (stetoskopi, spiediena sensori, cukura līmeņa noteicēji utt.).

RAKSTUROJUMS

- Gatavs lietošanai
- Dzidrs, bezkrāsains šķidrums
- Īpatsvars, apm. 0.9
- pH pie +20°C, apm. 5.5

GATAVS
LIETOŠNAI

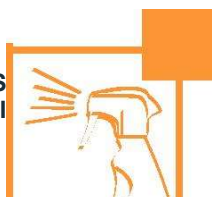



ANIOSPRAY QUICK

Dezinfekcijas līdzeklis izsmidzināšanai

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Izmantojams ar manuālo smidzinātāju ANIOS iekārtām.



1 Medicīniskās ierīces iepriekš notīriet ar ANIOS mazgāšanas dezinfekcijas līdzekli.



2 Vienmērīgi izsmidziniet uz medicīnas ierīču virsmām.



3 Atstājiet, lai iedarbojas, vismaz uz 30 sekundēm.

SASTĀVS

Hydroalkoholisks šķīdums (etanols 55%), kvartārs amonija propionāts.

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Bīstams - ievērot lietošanas piesardzības pasākumus (Izgatavots saskaņā ar spēkā esošajiem Eiropas noteikumiem par ķīmisko produktu klasifikāciju un marķēšanu). Uzglabāt temperatūrā no + 5 °C līdz + 25 °C. IIa klases medicīnas ierīce (grozīta Direktīva 93/42 / EEK).

IEPAKOJUMS

1 12 pudeles, 1litri katra, ar 4 smidzinātājiem Ref. 2084.073

2 4 kannas, 5 litri katra . Ref. 2084.034



Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - Francija
Tālr. +33 3 20 67 67 67 –
Fakss: +33 3 20 67 67 68 www.anios.com

MIKROBIOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Aktīvs pret	Standarts	Kontakta laiks
Baktērijām	EN 1040, EN 13727, EN 14561, EN 13697. SARM (EN 14561)	30 sek.
Mikobaktērijām	<i>Mycobacterium terrae</i> : EN 14348, EN 14563 <i>Mycobacterium avium</i> : EN 14348, EN 14563	30 sek. 5 min.
Raugi / pelējums	<i>Candida albicans</i> : EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697. <i>Trichophyton mentagrophytes</i> : EN 14562 <i>Aspergillus niger</i> : EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697.	30 sek. 5 min.
Vīrusi	Adenovīruss, HIV-1, PRV (HBV surogātors), BVDV (HCV surogātors), Vaccinia vīruss* Herpes vīruss, Corona vīruss, Rotavīruss, Griņas vīruss A (H1N1) <i>Feline Calicivirus</i> , MNV	30 sek. 5 min.

* RKI: Roberta Koča institūts iesaka izmantot dezinfekcijas līdzekļus, kas pieprasa "begrenzt viruzid virksan", t.i., ierobežotu vīrusu aktivitāti infekcijas ķēdes pārtraukšanai. Saskaņā ar RKI ierobežotā vīrusu aktivitāte atbilst aktivitātei pret vakcīnijas vīrusu un BVDV.

Produkta antimikrobiālās aktivitātes pilns apraksts ir iekļauts zinātniskajā dokumentācijā, kas pieejama pēc pieprasījuma.



GB2084-151230- Bez līguma fotogrāfijas.