

# ■ Foam 2 Unisepta®



Lietošanai gatavs dezinfekcijas un tīrīšanas putu šķīdums medicīnisko ierīču virsmām. Unisepta® Foam 2 ir īpaši piemērotas vietām, kas ir jutīgas pret alkoholu un ar “neagresīvu” sastāvu, to var izmantot pat smalkiem materiāliem.

## Galvenās produkta funkcijas

- Kontakta laiks: 1 - 5 minūtes
- Nesatur alkoholu
- Lieliska materiālu saderība
- Svaiga apelsīnu smarža
- Ideāli piemērots zobārstniecības krēsla apstrādei
- Neatstāj paliekas vai smērējumus
- CE marķējums – Atbilst Medicīnas ierīču direktīvai 93/42/EEC
- VAH/DGHM sertificēts



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 18 | CH-1225 Chêne Bourg | Ženēva | Šveice Tél + 41 22 839 79 00 | Faksa numurs + 41 22 839 79 10 | [info@usfhc.com](mailto:info@usfhc.com) [www.usfhealthcare.com](http://www.usfhealthcare.com)  
[info@usfhc.com](mailto:info@usfhc.com) [info@usfhc.com](mailto:info@usfhc.com)




# ■ Foam 2 Unisepta®

## Lietošanas protokols

### Pirms lietošanas


Pārliecinieties, ka tiek valkāti atbilstoši cimdi.

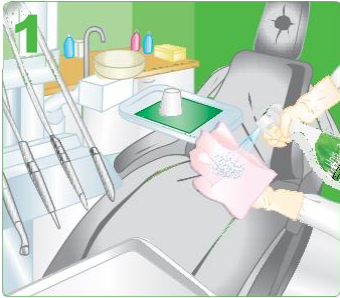

1 Uzklājiet Unisepta Foam2 uz vai iekš neausta materiāla auduma.



2 Noslaukiet, pārļiecinoties, ka visa platība tiek apstrādāta un nonāk saskarē ar šķīdumu.

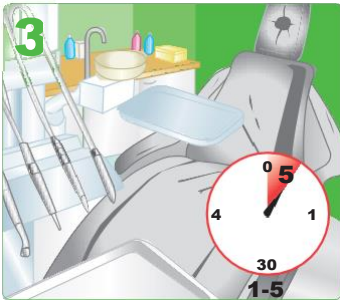


3 Ievērojiet norādīto kontakta laiku pretmikrobu iedarbībai. Skalošana nav nepieciešama, izņemot gadījumus, kad medicīniskā ierīce nonāk saskarē ar ādu vai gļotādām.

### Piesardzības pasākumi

Bīstami: ievērojiet lietošanas piesardzības pasākumus (kas noteikti saskaņā ar spēkā esošajiem Eiropas noteikumiem par ķīmisko vielu klasifikāciju un marķēšanu). Pirms katras lietošanas izlasiet etiķeti un informāciju par produktu. Uzglabāt temperatūrā no + 5 ° C līdz + 35 ° C. Rezervēts profesionālai lietošanai. Medicīniskā ierīce IIa klase (atbilst grozītajai medicīnas ierīču direktīvai 93/42 / EEK).

## Efektivitāte

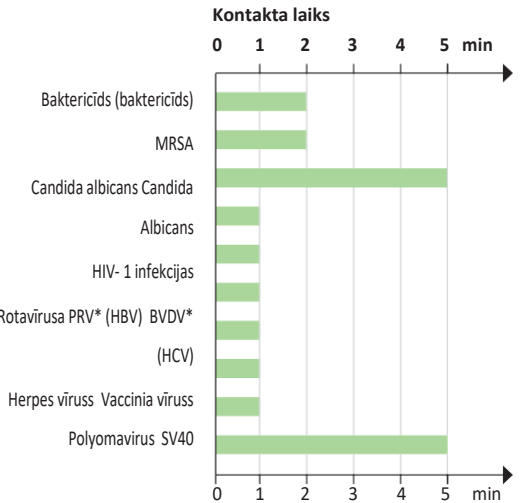

\* PRV: B hepatīta surogāts

\* BVDV: C hepatīta surogāts

Roberta Koha institūts iesaka izmantot dezinfekcijas līdzekļus ierobežota virucidāla aktivitāte, lai pārtrauktu infekcijas ķēdi. Pēc RKI, ierobežota virucidāla aktivitāte (efektīva pret apvalka vīrusiem) atbilst aktivitātei pret Vaccinia vīrusu un BVDV.

### Atbilst Eiropas standartiem

Baktericīds: EN 1040, EN 13727, EN 13697

MRSA: EN 13727, EN 13697

Rauga iznīcināšana: EN 1275, EN 13624, EN 13697

Darbojas uz vīrusiem saskaņā ar EN 14476

### Produkta sastāvs

100 g Unisepta Foam 2 satur: 0, 30g didecildimetilamonija hlorīds, smaržas un palīgvielas.

### Fiziskie dati

Krāsu: Bezkrāsains

Smaržas: Svaigu apelsīnu aromāts

Uzglabāšanas laiks: 2 gadi

Konteiners: Izgatavots no otrreiz pārstrādājama HDPE materiāla

### Iepakojuma

750ml aerosols	1L	2,5l	5L
✓			✓



**ECOEngage**  
Our Ecological Engagement



**Unident**  
USF Healthcare