



# ■ Foam 2 Wipes Unisepta®

Ātra medicīnisko ierīču tīrīšana  
un dezinfekcija.



Lietošanai gatavas salvetes ātrai medicīnisko ierīču dezinfekcijai un tīrīšanai. Unisepta®  
Foam 2 Salvetes ir izgatavotas no 100% bioloģiski noārdāmas viskozes .

## Galvenās produkta funkcijas

- Impregnēšanas šķīdums bez alkohola
- Kontakta laiks: 1 - 5 minūtes
- Izgatavots no viskozes - 100% bioloģiski noārdāms
- Bez smaržām vai alerģiju veicinošām vielām
- Ideāli piemērots zobārstniecības krēsla apstrādāšanai
- Salvetes izmērs: 180 x 200mm
- CE marķējums – atbilst Medicīnas ierīču direktīvai 93/42/EEK
- Ērts 100 salvetešu dozators



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 4 | CH-1225 Chêne Bourg | Geneva | Switzerland  
Tel + 41 22 839 79 00 | Fax + 41 22 839 79 10 | info@usfhc.com  
[www.usfhealthcare.com](http://www.usfhealthcare.com)

**UNIDENT**  
SWISS

# ■ Foam 2 Wipes Unisepta®

## Protocol for use

### Pirms lietošanas

Pārliecinieties, ka ir valkāti atbilstoši cimdi.



1 Izņemiet salveti no iepakojuma.



2 Uzlieciet salveti uz apstādājamās vietas



3 Ievērojiet kontakta laiku, kas norādīts vēlamajai pretmikrobu aktivitātei. Skalošana nav nepieciešama, ja vien medicīnas ierīce nenonāk saskarē ar ādu vai gļotādām.




4 Pārliecinieties, ka iepakojums pēc katras lietošanas reizes ir cieši noslēgts.

### Piesardzības pasākumi

Bīstami - ievērot piesardzības pasākumus attiecībā uz lietošanu. Medicīnas ierīču klase IIa, CE0459. Pirms lietošanas izlasiet etiķeti un informāciju par zāļu lietošanu..

Uzglabāšana no +5°C līdz +35°C.

## Efektivitāte

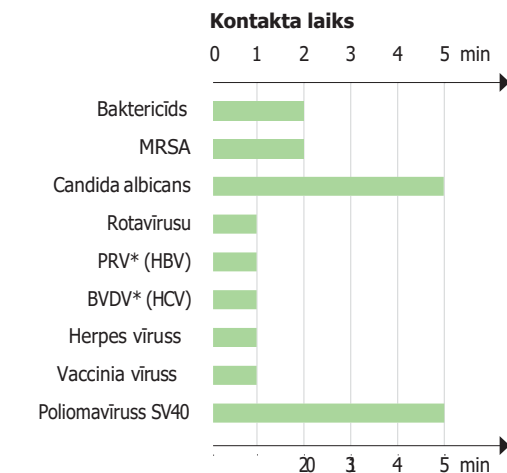

\* PRV: Hepatīta surogāts B

\* BVDV: Hepatīta surogāts C

† Impregnēšanas šķiduma efektivitāte

Roberta Koha institūts iesaka izmantot dezinfekcijas līdzekļus, kas apgalvo, ka ir ierobežots virucīda aktivitāte, lai pārtrauktu infekcijas ķēdi. Pēc RKI domām, ierobežots virucīdālā aktivitāte (efektīva pret apvalka vīrusiem) atbilst aktivitātei pret Vaccinia vīrusu un BVDV.

### Atbilst Eiropas standartiem

Impregnēšanas šķidrums ir:

Baktericīds: EN 1040, EN 13727, EN 13697

MRSA: EN 13727, EN 13697

Rauga iznīcināšana: EN 1275, EN 13624, EN 13697

### Produkta sastāvs

100g no impregnēšanas šķiduma satur: 0.30g

didecildimetilamonija hlorīdu, palīgvielas.

### Fiziskie dati

No viskozes izgatavota salvete (spurlace 50gr /m2), 100% bioloģiski noārdās.

Krāsa: Balta salvete

Smarža: Bez smaržas

Uzglabāšanas laiks: 2 gadi (neatvērti)

### Packaging

	100 Salvetes	150 Salvetes
Iepakojums	V	