

# Plus Wipes Unisepta®

Medicīnas ierīču virsmu ātra  
dezinfekcija.



Lietošanai gatava, vienreizējas salvetes ātrai neinvazīvu medicīnas ierīču virsmu dezinfekcijai. Unisepta® Plus salvetes ir piesūcinātas ar Unisepta® Plus šķīdumu. Ērtas, ekonomiskas un ar plašu efektivitātes spektru, tās ir ideāli piemērotas lietošanai starp pacientu pieņemšanām.

## Galvenās produkta priekšrocības

- Etanola bāzes
- Kontakta laiks: 30 sekundes
- Svaigi citrusaugļu aromāti
- Neatstāj atlikumus vai smērēšanu
- CE marķējums – atbilst Medicīnas ierīču direktīvai 93/42/EEC
- Unisepta® Plus šķīdums VAH/DGHM sertificēts
- Salvetes izmērs 130 x 190mm



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 4 | CH-1225 Chêne Bourg | Geneva | Switzerland  
Tel + 41 22 839 79 00 | Fax + 41 22 839 79 10 | info@usfhc.com  
[www.usfhealthcare.com](http://www.usfhealthcare.com)

**UNIDENT**  
SWISS

# Plus Wipes Unisepta®

## Lietošanas protokols

### Pirms lietošanas

Pārlicinieties, vai tiek nēsāti atbilstoši cimdi.



Izveliet salveti no konteina horizontālā virzienā un atdali ar asu vilkšanas kustību.



Uzklājiet dezinfekcijas līdzekli uz iepriekš notīrītas virsmas.



Ļauj šķīdumam darboties vismaz 30 sekundes. **Neskalojiet!**



Pārlicinieties, ka konteiners ir droši aizvērts pēc katras lietošanas.


### Piesardzības pasākumi

Bīstami - ievēro piesardzības pasākumus attiecībā uz lietošanu (noteikti saskaņā ar Direktīvu 99/45/EK un tās pielāgojumiem).

Uzglabāšana no +5°C līdz +25°C.

Medicīnas ierīču klase IIa, CE0459 (Direktīva 93/42/EEK ar grozījumiem).

## Efektivitāte

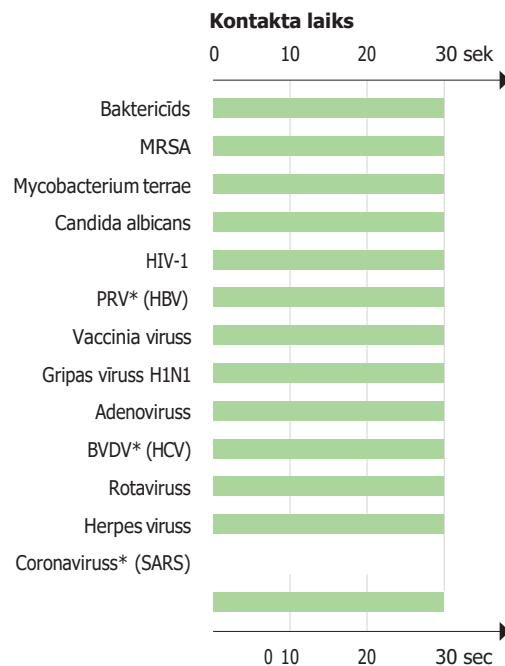

\* PRV: hepatīta surogāts B  
\* BVDV: hepatīta surogāts C  
\* Coronavirus: Surogāts SARS

† Impregnēšanas šķiduma efektivitāte

### Atbilst Eiropas standartiem

Impregnēšanas šķīdums ir:

Baktericīds: EN 1040, EN 1276, EN 13727,  
EN 14561

Tuberkulocīds: EN 14348, EN 14563

Rauga iznīcināšana: EN 1275, EN 13624, EN 14562

### Produkta sastāvs

100g piesūcinātā šķīduma Unisepta® Plus satur,  
Etanols 55g, didecilmetiloksietilamonija  
propionāts 0.11g, Smaržas.

### Fiziskie dati

Krāsa: Baltas salvetes

Smarža: Svaigi citrusaugļu aromāti

Glabāšanas laiks: 3 gadi (neatvērti)

Konteineri: Izgatavots no pārstrādājama HDPE materiāla

### Iepakojums

	150 Salvetes
Konteineris	✓
Uzpildes	✓