

IZCILA TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA VIENĀ VIENKĀRŠĀ PROCESĀ

Sekusept® PLUS

Glucoprotamin® bāzes dezinfekcijas līdzeklis manuālai tīrīšanai

Sekusept PLUS, kas satur glikoprotamīnu, unikālo Ecolab aktīvo sastāvdaļu, ir aldehīdus, hloru, QAS nesaturoša alternatīva medicīnas instrumentu tīrīšanai un dezinfekcijai.

Efektīva pret plašu mikrobu spektru, lietotāji ir pārliecināti par aizsardzību pret asins pārnēsātiem vīrusiem.

Sekusept PLUS, kas īpaši piemērots termolabilām ierīcēm, nodrošina arī:

- ▲ Stipri piesārņotu instrumentu rezultatīvu tīrīšanu
- ▲ Ātru iedarbību
- ▲ Labu materiālu saderību



Sekusept® PLUS

Glucoprotamin® bāzes dezinfekcijas līdzeklis manuālai tīrīšanai

Kāpēc Sekusept PLUS?

Mūsu aktīvā viela glikoprotamīns padara šo produktu ārkārtīgi spēcīgu. Lieliskas tīrīšanas īpašības atbilst plašam efektivitātes spektram, ieskaitot TB.

Unikāla drošība personālam un instrumentiem, tostarp elastīgiem endoskopiem.

TĪRĪŠANAS VEIKTSPĒJA


Sekusept PLUS piedāvā lielisku tīrīšanas veiktspēju, īpaši ļoti piesārņotiem instrumentiem. Pat piekaltušas asinis var viegli noņemt.

MATERIĀLU SADERĪBA

Unikālais sastāvdaļu maisījums nodrošina Sekusept PLUS izcilu materiālu savietojamību. Produkts ir piemērots

visa veida instrumentiem, tostarp elastīgiem endoskopiem ar Olympus apstiprinājumu.

Nav piemērots silikona instrumentiem.

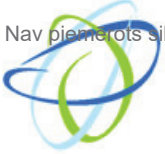

Glucoprotamin®

MIKROBIOLOĢISKO TESTU REZULTĀTI

EFEKTIVITĀTE	KONCENTRĀCIJA (%)	KONTAKTA LAIKS
Baktericīds EN13727, EN14561, EN13624 (netīri)	1.5*	60 min*
Pretraugu EN13727, EN14561, EN13624 (netīri)	2.5	30 min
	4.0	15 mins
instrumentu dezinfekcija ultraskaņas vannā (tuberculocidals saskaņā DGHM 2001 un EN 14563)	3.0	5 min
tuberculocīda iedarbība EN14348, EN14563 (netīri)	1.5	60 min
Efektīvs pret apvalkotiem vīrusiem (iesk. HIV, HBV, HCV, Herpes, Rota, Vakcīnija, papova) RKI rekomendācijas 01/2004*	1.0	15 min
Adeno**	2.0	1 h
Polyoma SV40**	3.0	2 h

** DVV 2008

EUROPEAN HEADQUARTERS: ECOLAB EUROPE GMBH

Richtistrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
+41 (0) 44 877 2001

www.ecolab.com

ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany
+49 (0) 2173 599 0

www.de.ecolab.eu

CE 0297

SIA "Medilink"

Višķu iela 2 k-1, Rīga
medilink@medilink.lv
www.medilink.lv

PIELIETOŠANAS JOMA

medicīnisko instrumentu manuālai iepriekšēja tīrīšana un dezinfekcijai. Īpaši piemērots termolabīlām ierīcēm, kuras nevar autoklāvāt, piem. elastīgi endoskopi un anestēzijas iekārtas.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Sagatavojiet dezinfekcijas šķīdumu ar ūdeni vismaz ar dzeramā ūdens kvalitāti. Iegremdējiet instrumentus, nodrošinot, ka visas virsmas ir pilnībā mitras.

Tīriet priekšmetus saskaņā ar instrumenta ražotāja norādījumiem, ieskaitot mehānisku darbību (piemēram, suku, noslaukot), līdz tie ir vizuāli tīri. Ja to lieto ultraskaņas vannā, sonifikācijas laikā turiet vannu nosegtu. Pēc nepieciešamā saskares laika instrumentus izskalo ar ūdeni vismaz ar dzeramā ūdens kvalitāti. Pēc tam nosusiniet ārējās virsmas un iekšējos kanālus (piemēram, endoskopus). Lai veiktu terminālu dezinfekciju, lūdzu, apstrādājiet tos atkārtoti. Pēc RKI ieteikuma (Robert-Koch institūts) šķīdums katru dienu jāgatavo svaigs. Neizlietots šķīdums: stabils 14 dienas (pārsegtā instrumentu vannā). Pēc lietošanas rūpīgi izskalo ar polikarbonātu, polisulfonu un akrila stiklu, lai izvairītos no materiāla izmaiņām.

SASTĀVDAĻAS

100 g satur aktīvās vielas: 25 g Glucoprotamīns (alkilamīns)

IĒPAKOJUMA INFORMĀCIJA

PRODUKTS	OUTER SIZE	ORDER CODE
Sekusept PLUS	4 x 2L	xxxxxxx
Sekusept PLUS	6L	xxxxxxx

Tikai profesionālai lietošanai.

ECOLAB®