

TĪRĪŠANA. TIK TĪRI UN VIEGLI!

Sekusept® Pure Clean

Medicīnisko iekārtu, t.sk., elastīgo endoskopa, manuālai iepriekšējai tīrīšanai.

Medicīnisko iekārtu un endoskopa tīrīšana ir svarīgs priekšnosacījums efektīvai dezinfekcijai.

Sekusept Pure Clean ar tā kombinētajām sastāvdaļām palīdz novērst atkārtotu instrumentu tīrīšanu, kas var tikt sasmērēti ar visiem parastajiem piesārņotājiem medicīniskā darba zonās (piemēram, asinis, proteīni, serums).

Sekusept Pure Clean nodrošina:

- ▲ Ātru iedarbību.
- ▲ Rūpīgu tīrīšanu.
- ▲ Rentabilitāti dēļ zemajām lietošanas koncentrācijām.



Sekusept® Pure Clean

Medicīnisko iekārtu, t.sk., elastīgo endoskoku, manuālai iepriekšējai tīrīšanai.

Kādēļ izmantot Sekusept Pure Clean?

TĪRĪŠANAS EFEKTIVITĀTE

Sekusept Pure Clean nodrošina tīrīšanu pēc augstākajiem standartiem un ir īpaši efektīvs pret tipiskiem piesārņotājiem medicīniskā darba zonās. Tā tīrīšanas veikspēja ir pārbaudīta un, salīdzinājumā ar citiem šobrīd tirgū esošiem tīrīšanas līdzekļiem, testa rezultāti ir lieliski (skat. tabulu zemāk).

Unikālais sastāvdaļu maisījums palīdz noņemt netīrumus no instrumentiem, kas palīdz saīsināt iepriekšējās tīrīšanas ciklu un novērš atkārtotu tīrīšanu.

DROŠS LIETOTĀJAM UN INSTRUMENTAM

Sekusept Pure Clean lietot ir droši un viegli, jo tā sastāva formula ir neitrāla, bez smaržvielām un nesatur enzīmus.

Tā labās materiālu saderības dēļ, to var izmantot dažādiem instrumentiem, t.sk., arī no krāsaina anodēta alumīnija.

ĒRTS

Sekusept Pure Clean ir gaiši zilā krāsā, lai vizuāli varētu noteikt, ka produkts tiek lietots. Zemā putošanas formula nodrošina labu pamanāmību lietošanas laikā un to ir viegli noskalot pēc tīrīšanas.

EKONOMISKS

Sekusept Pure Clean var tikt izmantots zemā koncentrācijā diapazonā no 0,3% (3ml / L) līdz 1% (10ml / L), kas nozīmē, ka vienam ciklam nepieciešams mazāk produkta.




Sekusept Pure Clean
2L pudele

Sekusept Pure Clean
6L kanna

*Tīrīšanas efektivitātes salīdzinājums.

Sekusept Pure Clean salīdzinājumā ar šobrīd tirgū esošajiem produktiem.
Produkti testēti: 0,5% koncentrācijā un 2 minūšu garumā, bez mehāniskām darbībām.

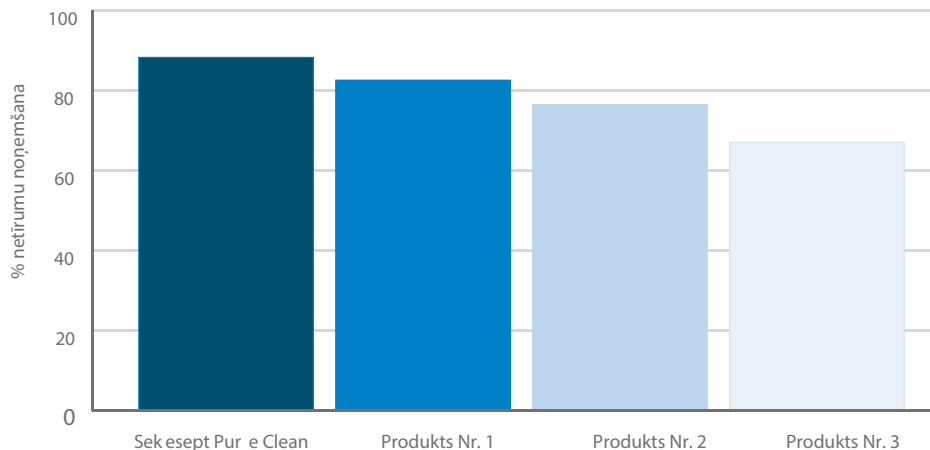

ECOLAB HEALTHCARE EUROPE

Richtstrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
+41 (0) 44 877 2000
www.ecolab.eu



ECOLAB
DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany
+49 (0) 2173 599 0

SIA „ECOLAB”
Bauskas iela 58a - 8
Rīga, LV-1004
+371 67063770



ĒRTUMS. VIEGLUMS. TĪRĪBA.

PIELIETOJUMA JOMAS

Manuālai medicīnisko instrumentu, t.sk., elastīgo endoskoku un to piederumu, piemēram, ķirurģisko instrumentu un stingro endoskoku, kā arī MIC instrumentu tīrīšanai.

INDIKĀCIJAS

Atkarībā no netīrumu veida un daudzuma, pagatavojiet šķīdumu tīrā krāna ūdenī koncentrācijā 0,3% (3ml / L) - 1% (10ml / L). Iemērciet tajā instrumentus tā, lai visas virsmas būtu pilnībā slapjas. Tīriet instrumentus atbilstoši tā ražotāja instrukcijām, t.sk., veiciet mehāniskas darbības (piemēram, beršana, slaucīšana) līdz instrumenti vizuāli ir tīri. Ja tiek izmantota ultraskaņas vanna, raugieties, lai tīrīšanas laikā vannai ir uzlikts vāks.

Pēc tam noskalojiet ar ūdeni, kas mazākais atbilst dzeramā ūdens prasībām, un nožāvējiet ārējās virsmas un iekšējos kanālus (piemēram, endoskopiem).

Papildus rekomendējam mūsu produktus Sekusept aktiv manuālajam procesam vai SolidSafe System automatizētajam tīrīšanas procesam. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzam sazināties ar savu Ecolab pārstāvi.

SASTĀVS

nejonu virsmaktīvās vielas, kompleksveidotāji, pH regulators, pastiprinātājs un krāsviela

Iepakoējums un informācija pasūtījumiem

PRODUKTS	Iepakoējums	Produkta kods
Sekusept Pure Clean kanna	4 x 2L	3080920
Sekusept Pure Clean pudele	1 x 6L	3080940

UZGLABĀŠANA

Originālajā iepakojumā, temperatūrā līdz 25°C.

Tikai profesionālai lietošanai.