

ASEPTANIOS AD

Gaisa dezinfektants



DROŠS

- Nesatur aldehīdus un smagos metālus
- Produkts uz etiķpārskābes bāzes – novērš koroziju
- ASEPTANIOS AD - **AEROSEPT ULTRA 150** / **AEROSEPT 500** efektīvs process saskaņā ar NF T 72-281

EFEKTĪVS

- Plašs iedarbības spektrs un efektivitāte 30 minūtēs
- Neatstāj nosēdumus un nesmērē virsmas pēc izsmidzināšanas

VIENKĀRŠS

- Gatavs lietošanai
- Izklīdes laiku automātiski aprēķina AEROSEPT ULTRA 150 un AEROSEPT 500

INDIKĀCIJAS

Nodrošina virsmu un iepriekš notīrīta medicīniskā aprīkojumu dezinfekciju pret mikroorganismiem gaisā.

RAKSTUROJUMS

- Lietot, kad telpā nav cilvēku.
- Dzidrs, bezkrāsains šķidrums
- Lietošanai kopā ar AEROSEPT ULTRA 150 un AEROSEPT 500
- Patēriņš: 7 ml/m³



AUTOMĀTISKA
IZSMIDZINĀŠANA

ASEPTANIOS AD

Gaisa dezinfektants

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI: Lietot, kad telpā nav cilvēku!

1. Ievietojiet konteineru iekārtā AEROSEPT COMPACT 250/AEROSEPT 500. Novietojiet iekārtu iepriekš iztīrītas telpas stūrī. Pielāgojiet programmu atbilstoši dezinficējamās telpas tilpumam.
2. Iedarbiniet AEROSEPT COMPACT 250/AEROSEPT 500 un atstājiet telpu. Atliktais starts iestatīts uz 1 minūti (var pielāgot no 1 minūtes līdz 9 stundām).
3. Izsmidzināšana sākas. Izklīdes laiks tiek automātiski aprēķināts atkarībā no izvēlēta telpas tilpuma.
4. **Nemiet vērā saskarsmes ilgumu, kas atkarīgs no vēlamās antimikrobiālās aktivitātes.** Pirms atgriešanās istabā, uzvelciet aizsargmasku.
5. Izvēdiniet gaisu telpā (lūdzu, skatīt MSDS un zinātnisko failu).

Piezīme. Lūdzu, sazinieties ar LABORATOIRES ANIOS, lai pārliecinātos par produkta saderību ar materiāliem, kas jutīgi pret oksidantiem.

SASTĀVS

Stabilizēts etiķpārskābes (N° CAS 79-21-0: +/- 1200 ppm) un ūdeņraža peroksīda šķīdums.

PIESARDZĪBA LIETOŠANĀ

Bīstams – ievērot piesardzību lietošanā (norādījumi atbilst Eiropas Savienības pašreizējiem noteikumiem par ķīmisko produktu klasifikāciju un marķēšanu). Lietojiet biocīdus līdzekļus piesardzīgi. Pirms katras lietošanas reizes, izlasiet etiķeti un informāciju par produktu. **Uzglabāšana: +5 °C līdz +25 °C vertikālā stāvoklī.** Biocīds produkts, kas paredzēts virsmu dezinfekcijai (1. grupa – PT2) – lietošana paredzēta profesionāļiem.

IEPAKOJUMS

- 4 divlitru kannas2122.724
- 4 pieclitru kannas ar sūkņššanas cauruli..... 2122.795



MIKROBIOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

ASEPTANIOS AD – AEROSEPT 500 process ir efektīvs saskaņā ar Francijas pielietošanas standartu NF T 72-281 (baktericīds, mikobaktericīds, fungicīds, virucīds, sporicīds) – 7ml/m³ – 55°C.

Aktīvs pret	AEROSEPT 500 : 7ml/m ³ +20 °C	
	Samazinājums	Saskarsmes laiks
Baktērijas •Pseudomonas aeruginosa •Staphylococcus aureus •Escherichia coli •Enterococcus hirae	≥ 6 log	30 min
Mikobaktērijas	≥ 6 log	60 min
Rauga sēnītes •Candida albicans	≥ 6 log	15 min
Pelējuma sēnītes •Aspergillus niger	≥ 6 log	120 min
Vīrusi •Poliiovirus •Adenovirus •MNV	≥ 4 log	60 min
Baktēriju sporas •Bacillus subtilis	≥ 4 log	120 min

Šķīdums ASEPTANIOS AD ir baktericīds (EN 1040, EN 1276, EN 13697), fungicīds (EN 1275, EN 1650, EN 13697), mikobaktericīds (EN 14348, EN 13697), virucīds (EN 14476), sporicīds (EN 13704).

ASEPTANIOS AD – AEROSEPT COMPACT 250 process ir efektīvs saskaņā ar Francijas pielietošanas standartu NF T 72-281 – 7ml/m³ – 55°C.

Pilns produkta antimikrobiālās aktivitātes apraksts – zinātniskajā dosļē, kas pieejams pēc pieprasījuma.