



## Atsūkšanas iekārta NEW ASKIR20



## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

CE 0123

**JAUNAIS ASKIR 20** aspirators ir pārnēsājama iekārta, kas darbojas ar 230V ~ / 50 Hz tīkla elektrību, paredzēta ķermeņa šķidrums aspirācijai pieaugušajiem un bērniem. Tas ir īpaši piemērots deguna, perorālai vai trahejas gļotu, kataru vai asiņu aspirācijai pēc nelielām ķirurģiskām procedūrām, un to var izmantot pēcoperācijas terapijā mājās vai ērti transportēt no vienas slimnīcas nodaļas uz citu. Viegli pārnēsājams aprīkojums, kas paredzēts nepārtrauktai lietošanai. Izgatavots no īpaši karstumizturīga, elektriski izolēta plastmasas materiāla, kas atbilst jaunākajiem Eiropas drošības standartiem, produkts tiek piegādāts ar pilnu polikarbonāta autoklāvējamu burku ar pārplūdes vārstu un aprīkots ar aspirācijas regulatoru un vakuuma indikatoru, kas atrodas uz priekšējā paneļa..

#### PAMATA BRĪDINĀJUMI



**PIRMS LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET INSTRUKCIJAS ROKASGRĀMATU**



**REZERVĒTS TIKAI AUGSTI KVALIFICĒTAM PERSONĀLAM**



**INSTRUMENTU NEDRĪKST IZJAUKT**

**TEHNISKAJAI APKALPOŠANAI VIENMĒR SAZINIETIES AR CA-MI Srl**

#### SVARĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI

1. Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet iekārtas stāvokli. Iekārtas virsma ir rūpīgi jāpārbauda, vai nav vizuālu bojājumu. Pārbaudiet tīkla kabeli un nepievienojiet to strāvas padevei, ja ir redzami bojājumi;
2. Pirms ierīces pievienošanas vienmēr pārbaudiet, vai uz datu uzlīmes norādītie elektriskie dati un izmantotās kontaktdakšas veids atbilst elektrotīkla elektrības datiem, pie kuriem tā tiks pievienota;
3. Ja ierīces komplektācijā iekļautā kontaktdakša nav saderīga ar elektrotīkla elektrības kontaktlīdzi, sazinieties ar kvalificētu personālu, lai nomainītu kontaktdakšu pret piemērota tipa kontaktdakšu. Vienkāršu vai vairāku un/vai pagarinājuma adapteru izmantošana parasti nav ieteicama. Ikreiz, kad to lietošana ir obligāta, izmantojiet tos atbilstoši drošības noteikumiem, tomēr pievērsot uzmanību tam, lai nepārsniegtu maksimālos strāvas padeves ierobežojumus, kas norādīti uz adapteriem un pagarinājumiem.
4. Ievērojiet drošības noteikumus, kas norādīti elektroierīcēm un jo īpaši:
  - Izmantojiet ražotāja nodrošinātās oriģinālās sastāvdaļas un piederumus, lai garantētu ierīces augstāko efektivitāti un drošību;
  - Ierīci var lietot tikai ar bakterioloģisko filtru;
  - Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī;
  - Novietojiet instrumentu uz stabilām un līdzenām virsmām;
  - Novietojiet ierīci tā, lai gaisa ieplūdes atveres aizmugurē netiktu aizsegta;
  - Nelietot uzliesmojošu vielu, piemēram, anestēzijas līdzekļa, skābekļa vai slāpekļa oksīda klātbūtnē;
  - Neaiztieciet ierīci ar mitrām rokām un vienmēr nepieļaujiet ierīces saskari ar šķidrumiem;
  - Glabājiet bērniem vai rīcībspējīgām personām nepieejamā vietā bez uzraudzības;
  - Neatstājiet ierīci pievienotu strāvas padeves kontaktlīdzim, kad tā netiek lietota;
  - Nevelciet aiz strāvas padeves kabeļa, lai atvienotu kontaktdakšu, pareizi izņemiet kontaktdakšu no strāvas kontaktlīdzas;
  - Uzglabāt un lietot medicīnisko ierīci no atmosfēras faktoriem aizsargātā vidē un attālumā no siltuma avotiem;
  - Neizmantojiet ierīci krūšu kurvja drenāžai.
5. Lai veiktu remontu, sazinieties tikai ar tehnisko servisu un pieprasiet izmantot oriģinālās rezerves daļas. Iepriekš minētā neievērošana var apdraudēt ierīces drošību;
6. Šai medicīnas ierīcei jābūt paredzētai lietošanai tikai tiem, kas ir izstrādāti un aprakstīti šajā rokasgrāmatā. Jebkāda cita lietošana ir jāuzskata par nepareizu un tāpēc bīstamu; ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai pieslēgšanas elektrosistēmai, kas neatbilst spēkā esošajiem noteikumiem, dēļ;
7. Jāveic īpaši piesardzības pasākumi attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību. Medicīniskā ierīce jāuzstāda un jālieto saskaņā ar pavaddokumentos sniegto informāciju;
8. Instrumentu un piederumu izlāde jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem katrā lietošanas valstī.
9. Neviena no elektriskām vai mehāniskām detaļām nav paredzēta klientiem vai galalietotājiem, lai tās varētu remontēt. Neatveriet ierīci, nepareizi rīkojieties ar elektriskām/mehāniskām daļām. Vienmēr sazinieties ar tehnisko palīdzību
10. Ierīces izmantošana vides apstākļos, kas atšķiras no šajā rokasgrāmatā norādītajiem, var nopietni kaitēt tās pašas ierīces drošībai un tehniskajiem parametriem.

**Ražotājs nevar būt atbildīgs par nejaušiem vai netiešiem bojājumiem, ja ierīce tiek pārveidota, remontēta bez atļaujas vai ja kāda no tās sastāvdaļām tiek bojāta negadījuma vai nepareizas lietošanas dēļ..**










**Jebkādas minimālas ierīces modifikācijas/remonts anulē garantiju un negarantē atbilstību MDD 93/42/EEC (un turpmāko izmaiņu) un tā normatīvo aktu tehniskajām prasībām.**

### TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

<b>Modelis</b>	NEW ASKIR 20
<b>Tipoloģija (MDD 93/42/EEC)</b>	<b>Medicīniskā ierīce Klase II a</b>
Klasifikācija UNI EN ISO 10079-1	AUGSTS VAKUUMS / ZEMA PLUSMA
Galvenais spriegums	230 V ~ / 50 Hz
Elektrības patēriņš	184 VA
Fāze	F 1 x 1.6A 250 V
Maksimālā sūkšanas aspirācija (bez burkas)	-75kPa (- 0.75 bar) Regulējams no -75kPa (-0.75 Bar) līdz -10kPa (-0.10 Bar)
Maksimālā plūsma (bez burkas)	16 l/min
Svars	2.5 Kg
Izmēri	350 x 210 x 180 mm
Darbība (no 35°C un 110 % darba sprieguma)	Bez pārtraukuma darbība
Darba stāvoklis	Istabas temperatūra: 5 ÷ 35 °C Telpas mitruma procents: 30 ÷ 75 % RH Augstums: 0 ÷ 2000m s.l.m
Glabāšanas nosacījumi	Telpas temperatūra: - 40 ÷ 70 °C Telpas mitruma procents: 10 ÷ 100% RH

### SIMBOLI

	Klase 2 izolācijas iekārtas
<b>CE 0123</b>	CE marķējums saskaņā ar EK direktīvu 93/42/CEE un turpmākajām izmaiņām Ražotājs: CA-MI Srl - Via Ugo La Malfa n°31, 43010 Pilastrò (PR) Itālija
	Brīdinājums, skatiet lietošanas pamācību
	B tipa aprīkojums
	Drošinātājs
	Glabāt vēsā un sausā vietā
	Uzglabāšanas temperatūra: - 40 ÷ 70° C
~	Mainstrāva
Hz	Tīkla frekvence
I	IESLEGT
0	IZSLEGT
	DEHP ftalāti (atsūkšanas katetrs)

**Lūdzu, ņemiet vērā, ka tehniskās specifikācijas var atšķirties atkarībā no ražotāja ieskatiem!**

Norādījumi un ražotāja deklarācija – elektromagnētiskās emisijas		
Ķirurģiskais aspirators NEW ASKIR 20 ir paredzēts lietošanai tālāk norādītajā elektromagnētiskajā vidē. Ķirurģiskā aspiratora NEW ASKIR 20 klientam vai lietotājam ir jāpārliedz, ka tas tiek izmantots šādā vidē..		
Emisiju tests	Atbilstība	Elektromagnētiskā vide - norādījumi
Apstarotās/vadītās emisijas CISPR11	Groupa 1	Ķirurģiskais aspirators NEW ASKIR 20 izmantoja RF enerģiju tikai tā iekšējai darbībai. Tāpēc tā RF emisijas ir ļoti zemas un nerada traucējumus elektronisko ierīču tuvumā.
Apstarotās/vadītās emisijas CISPR11	Klase [B]	Ķirurģisko aspiratoru NEW ASKIR 20 var izmantot visās vidēs, tostarp mājās un tajās, kas ir tieši pieslēgtas publiskajam elektroīklam, kas piegādā elektroenerģiju vidēm, ko izmanto mājāsaimniecības ierīcēm.
Harmoniskās emisijas IEC/EN 61000-3-2	Klase [A]	
Sprieguma svārstības / mirgošanas emisijas IEC/EN 61000-3-3	Atbilst	

Norādījumi un ražotāja deklarācija – elektromagnētiskā imunitāte		
Ķirurģiskais aspirators NEW ASKIR 20 ir paredzēts lietošanai tālāk norādītajā elektromagnētiskajā vidē. Ķirurģiskā aspiratora NEW ASKIR 20 klientam vai lietotājam ir jāpārliecinās, ka tas tiek izmantots šādā vidē.		
Imunitātes tests	Atbilstība	Elektromagnētiskā vide - vadība
Elektrostatiskā izlāde (ESD) IEC/EN 61000-4-2	± 6kV kontaktā ± 8kV gaisā	Grīdām jābūt koka, betona vai keramikas flīzēm. Ja grīdas ir pārklātas ar sintētisku materiālu, relatīvajam mitrumam jābūt vismaz 30%.
Ātra elektriskā pāreja IEC/EN 61000-4-4	± 2kV enerģijas padeve	Strāvas tīkla kvalitātei ir jāatbilst tipiskai komerciālai videi vai slimnīcai.
Pārspriegums IEC/EN 61000-4-5	± 1kV diferenciālais režīms	Strāvas tīkla kvalitātei ir jāatbilst tipiskai komerciālai videi vai slimnīcai.
Sprieguma zudums, tsi sprieguma pārtraukumi un svārstības IEC/EN 61000-4-11	5%U <sub>T</sub> for 0.5 cycle 40%U <sub>T</sub> for 05 cycle 70%U <sub>T</sub> for 25 cycle <5%U <sub>T</sub> for 5 sec	Strāvas tīkla kvalitātei ir jāatbilst tipiskai komerciālai videi vai slimnīcai. Ja ķirurģiskā aspiratora NEW ASKIR 20 lietotājs pieprasa, lai ierīce darbotos nepārtraukti, ieteicams izmantot nepārtrauktības bloku..
Magnētiskais lauks IEC/EN 61000-4-8	3A/m	Jaudas frekvences magnētiskais lauks jāmēra paredzētajā uzstādīšanas vietā, lai nodrošinātu, ka tas ir pietiekami zems.
Vadītā imunitāte IEC/EN 61000-4-6	3Vrms 150kHz līdz 80MHz (ierīcēm, kas nav dzīvības uzturēšanas)	-
Veiktā apstarošana IEC/EN 61000-4-3	3V/m 80MHz līdz 2.5 GHz (ierīcēm, kas nav dzīvība – aprīkojums)	-
Piezīme U <sub>T</sub> is barošanas avota sprieguma vērtība		

### PIEDERUMU TĪRĪŠANA

Lai notīrītu ierīces plastmasas korpusu, valkājiet vienreizējās lietošanas lateksa cimdus un notīriet ar denaturētu spirtu vai hipoklorīta šķīdumiem. Autoklāvējamās burkas mazgāšana un/vai tīrīšana jāveic šādi:

- Valkājiet aizsargcimdus un priekšautu (ja nepieciešams, brilles un sejas masku), lai izvairītos no saskares ar piesārņojošām vielām;
- Atvienojiet burku no ierīces
- Atvienojiet visas caurules no burkas un aizsargfiltra
- Iztukšojiet un iznīciniet sūkšanas katetra saturu saskaņā ar jūsu valstī spēkā esošajiem likumiem;
- Atdaliet visas vāka daļas (pārplūdes vārsts, blīvgredzens);

Pēc vienreizējās lietošanas detaļu likvidēšanas un burkas izjaukšanas izmazgājiet to tekošā aukstā ūdenī un rūpīgi izskalojiet. Pēc tam iemērc siltā ūdenī (temperatūra nedrīkst pārsniegt 60°C). Rūpīgi nomazgājiet un, ja nepieciešams, izmantojiet neabrazīvu suku, lai noņemtu inkrustācijas. Noskalojiet tekošā siltā ūdenī un nosusiniet visas daļas ar mīkstu drānu (neabrazīvu).

Burku un vāku var autoklāvēt, ievietojot detaļas autoklāvā un veicot vienu sterilizācijas kāta ciklu pie 121°C (1 bāra relatīvais spiediens), pārliecinoties, ka burka ir novietota otrādi.

Burkas mehāniskā pretestība tiek garantēta līdz 30 sterilizācijas un tīrīšanas cikliem norādītajos apstākļos (EN ISO 10079-1).

Pārsniedzot šo robežu, plastmasas fizikāli mehāniskie raksturlielumi var samazināties, tāpēc ir ieteicams nomainīt daļu.

Pēc detaļu sterilizācijas un atdzesēšanas vides temperatūrā pārliecinieties, ka tās nav bojātas.

Salieciet burku šādi:

- Ievietojiet pārplūdes vārstu tā ligzdā vāciņā (zem VACUUM savienotāja)
- Ievietojiet peldošo vārstu, turot blīvgredzenu pret būra atvērumu
- Ievietojiet blīvgredzenu tā vietā ap vāku
- Pēc montāžas darbību pabeigšanas vienmēr pārliecinieties, ka pārklājums ir perfekti noslēgts, lai izvairītos no vakuuma noplūdēm vai šķidrums izplūdes

Aspirācijas caurules var sterilizēt autoklāvā, izmantojot sterilizācijas ciklu 120°C temperatūrā. Konisko savienotāju var sterilizēt autoklāvā, izmantojot sterilizācijas ciklu 121°C temperatūrā. Ierīce tagad ir gatava jaunam darbam.



**NEMAZGĀJIET, NESTERILIZĒJIET VAI NELIECIET AUTOKLĀVĀ ANTIBAKTERIĀLO FILTRU**

### PIEDERUMI

APRAKSTS
<b>Aspirācijas burka 1000cc</b>
<b>Koniska montāža</b>
<b>Cauruļu komplekts 6mm x 10mm (Caurspīdīga silikona)</b>
<b>Aspirācijas zonde CH 20</b>
<b>Antibakteriālais filtrs</b>

Filtrs ir izgatavots no (PTFE) hidrofobiska materiāla, kas novērš šķidrums iekļūšanu pneimatiskajā ķēdē.

Kad filtrs ir slapjš, ierīci nav iespējams izmantot, tāpēc filtrs ir nekavējoties jāmaina. Iespējama piesārņojuma vai krāsas maiņas gadījumā nekavējoties nomainiet filtru.

Neizmantojiet sūkšanas ierīci, ja nav uzstādīts aizsargfiltrs. Ja sūkšanas iekārta tiek izmantota ārkārtas situācijā vai pacientam, kur nav zināms piesārņojuma risks, filtrs ir jāmaina pēc katras lietošanas reizes. Pieejams pēc pieprasījuma ar dažādām versijām ar pilnu burku 2000cc.

Sūkšanas katetrs: vienreizējas lietošanas ierīce, kas lietojama vienam pacientam. Pēc lietošanas nemazgāt vai atkārtoti nesterilizēt. Atkārtota lietošana var izraisīt savstarpējās infekcijas. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām.

**BRĪDINĀJUMS:** Sūkšanas caurulēm ievietošanai cilvēka ķermenī, kas iegādātas atsevišķi, jāatbilst ISO 10993-1 standartiem par materiālu bioloģisko saderību.

#### PERIODISKĀS APKOPES

NEW ASKIR 20 atsūkšanas iekārtai nav nepieciešama apkope vai eļļošana.

Pirms katras lietošanas reizes ir jāpārbauda tā darbība un piederumi. Izsainojiet piederumus un vienmēr pārbaudiet plastmasas detaļu un strāvas kabeļa integritāti, jo tie var būt bojāti iepriekšējās lietošanas laikā. Pievienojiet kabeli elektriskajam tīklam un ieslēdziet to. Aizveriet aspiratora izvadus ar pirkstu un ar sūkšanas regulatoru maksimālā vakuuma pozīcijā pārbaudiet, vai vakuuma indikatori sasniedz -75kPa (-0,75 bar) minimums.

Pagrieziet pogu no labās puses uz kreiso un pārbaudiet aspirācijas regulēšanas vadību. Vakuuma indikatoram vajadzētu pazemināties -25 kPa (-0,25 bāri). Pārbaudiet, vai nav skaļu trokšņu, jo tie var norādīt uz nepareizu darbību. Drošinātāji (F 1 x 1,6 A 250 V), kas ir sasniedzami no ārpuses un atrodas kontaktdakšā, aizsargā instrumentu. Nomainot drošinātājus, vienmēr salīdziniet veidu un diapazonu.

Bojājuma veids	Iemesls	Risinājums
1. Atsūkšanas iekārta nedarbojas	Kabelis ir bojāts Ārējās barošanas avota kļūme	Nomainiet kabeli Pārbaudiet ārējo barošanas avotu
2. Nav atsūkšanas	Burkas vāciņš slikti pieskrūvēts	Noskrūvējiet vāciņu, pēc tam uzskrūvējiet to pareizi
3. Nav aspirācijas	Vāka blīvējums nav savā vietā	Noskrūvējiet vāciņu un pareizi ievietojiet blīvējumu tā vietā
4. Vakuuma jauda pacienta pusē ir ļoti zema vai tās nav	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vakuuma regulators iestāts uz minimumu</li> <li>Aizsprostots vai bojāts aizsargfiltrs</li> <li>Savienojuma caurules ir bloķētas, salocītas vai atvienotas</li> <li>Noslēgts vai bojāts slēgvārsts</li> <li>Bojāts sūkņa motors</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pagrieziet vakuuma regulatoru pulksteņrādītāja virzienā un pārbaudiet vakuuma vērtību mēritājā</li> <li>Nomainiet filtru</li> <li>Nomainiet vai atkal pievienojiet caurules, pārbaudiet burku savienojumus</li> <li>Iztukšojiet burku vai atvienojiet cauruli no burkas un atbloķējiet slēgvārstu. Ierīce darbojas tikai vertikālā stāvoklī</li> <li>Sazinieties ar pilnvarotu servisa personālu</li> </ul>
5. Pludiņš neaizveras	Ja vāciņš ir mazgāts, pārliecinieties, ka pludiņš nav daļēji atdalīts	Ievietojiet pludiņu tam paredzētajā vietā
6. Pludiņš neaizveras	Pludiņš ir pārklāts ar netīru materiālu	Noskrūvējiet vāciņu, atvienojiet to un ielieciet autoklāvā
7. Zema atsūkšanas jauda	Burkas iekšpusē putas	Piepildiet burku līdz 1/3 ar parastu ūdeni
<b>Kļūdas 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7</b>	<b>Neviens no līdzekļiem nav sasniedzis vēlamos rezultātus</b>	<b>Sazinieties ar pārdevēju vai CA-MI pēcpārdošanas palīdzības dienestu</b>

Ja pārpildes drošības sistēma ir aktivizēta, pārtrauciet šķidruma aspirāciju.

Ja pārpildes drošības sistēma nedarbojas, ir divi gadījumi:

1° situācija – Ja pārpildes drošības sistēma nedarbojas, aspirāciju aptur bakterioloģiskais filtrs, kas novērš šķidruma iekļūšanu ierīces iekšienē.

2° situācija – Ja nedarbojas abas drošības sistēmas, pastāv iespēja, ka ierīcē iekļūst šķidrums, tādā gadījumā nododiet ierīci CA-MI tehniskajam dienestam..



**PIRMS KATRAS PĀRBAUDES DARBĪBAS ANOMĀLIJU VAI SLIKTAS DARBĪBAS GADĪJUMĀ, LŪDZU, SAZINIETIES AR CA-MI TEHNISKO DIENESTU. CA-MI NESNIEDZ GARANTIJAS, JA PĒC TEHNISKĀ SERVISA PĀRBAUDES IZSKATĀS, KA INSTRUMENTS IR BOJĀTS.**

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

- Novietojiet ierīci uz līdzenas, horizontālas virsmas
- Savienojiet īsās silikona caurules galu ar antibakteriālo filtru pie atsūkšanas konektora.
- Otrā caurule, kas jau ir pievienota filtram, ir jāpievieno "VACUUM" burkas izvadam, kur ir nostiprināts sarkanais pludiņš (drošības pludiņš). Kad ir sasniegti 90% no burkas tilpuma, tiek aktivizēts drošības pludiņš (pludiņš aizver burkas aspirācijas savienotāju), lai izvairītos no šķidruma iekļūšanas ierīces iekšpusē.

**BRĪDINĀJUMS:** Pārļiecinieties, vai FLUID SIDE vai IN marķieris uz filtra atrodas tajā pusē, kas ir vērsta pret savākšanas trauka vāku, un ir ievietota "VACUUM".

Nepareizs savienojums izraisa tūlītēju ierīces bojāšanu, saskaroties ar iesūktiem šķidrumiem.

- Pievienojiet garo silikona cauruli pie "PATIENT" burkas izejas
- Pievienojiet otru garās silikona caurules galu zondes plastmasas savienotājam, pēc tam pievienojiet tam atsūkšanas zondi.
- Pievienojiet strāvas vadu ierīcei, pēc tam pievienojiet kontaktdakšu elektrības tīklam.
- Nospiediet slēdzi pozīcijā I, lai sāktu atsūkšanu.
- Noskrūvējiet burkas vāku un piepildiet burku 1/3 pilnu ar parastu ūdeni (tas atvieglo tīrīšanas darbību un ātri sasniedz funkcionalitātes vakuumu), pēc tam pareizi uzskrūvējiet burkas vāku..
- Darbības laikā burkai ir jāatrodas vertikālā stāvoklī, lai izvairītos no pārplūdes vārsta pārplūšanas, kas pārtrauktu aspirāciju. Ja tā notiek, izslēdziet ierīci un atvienojiet cauruli no burkas vāka (un atvienojiet no kontaktlīdzes "VACUUM").
- Kad esat pabeidzis, nospiediet slēdzi O pozīcijā un atvienojiet no kontaktlīdzes.
- Noņemiet piederumus un notīriet.



**NEKAD NELIETOJIET IERĪCI BEZ BURKAS UN/VAI AIZSARDZĪBAS FILTRA**

**PĀRLIECINĀTIET, LAI BĒRNI UN/VAI PSIHISKI SLIMI CILVĒKI NEIZMANTO IERĪCI BEZ PIEAUGUŠO UZRAUDZĪBAS**

**VIENMĒR NOVIETOJIET IERĪCI POZĪCIJĀ, KAS ATVIEGLO ATVIEŅOŠANU**

## ATGRIEŠANAS UN REMONTA NOTEIKUMI

**ATBILSTOT JAUNIEJIEM EIROPAS NOTEIKUMIEM, CA-MI Srl NORĀDA SVARĪGUS PUNKTUS, LAI AIZSARGĀTU INSTRUMENTU UN OPERATORU HIGIĒNU. ŠIE NOTEIKUMI JĀIEVĒRO, LAI GARANTĒTU HIGIĒNU UN DROŠĪBU VISIEM CILVĒKIEM, KAS DARBOJAS AR INSTRUMENTU, LAI IEGŪTU KVALITĀTI UN LABSAJŪTU.**

CA-MI garantē savam produktam 24 mēnešu GARANTĪJU pēc iegādes datuma.

Katrs atgrieztais instruments pirms remonta tiks higiēniski pārbaudīts. Ja CA-MI konstatē, ka instruments nav piemērots remontam skaidru iekšēja vai ārēja piesārņojuma pazīmju dēļ, tas tiks atgriezts klientam, norādot NAV REMONTĒJAMS INSTRUMENTS, pievienojot paskaidrojuma vēstuli. CA-MI izlems, vai piesārņojums ir noticis sliktas darbības vai nepareizas lietošanas dēļ. Ja piesārņojums ir radies sliktas darbības dēļ, CA-MI aizstās instrumentu.

CA-MI nav atbildīgs par piesārņotiem piederumiem, tie tiks aizstāti uz klienta rēķina.

Šim nolūkam OBLIGĀTI ir rūpīgi jādezinficē instrumenta ārējā daļa un piederumi ar drānu, kas samērcēta metilspirtā vai hipohlorīta šķīdumos. Ielieciet instrumentu un piederumus maisiņā ar norādi par dezinfekciju. Lūdzam precizēt arī bojājuma veidu, lai paātrinātu remontdarbus. Šim nolūkam, lūdzu, rūpīgi izlasiet instrukcijas

lai nesabojātu iekārtu nepareizas lietošanas rezultātā. Vienmēr norādiet konstatēto kļūdu, lai CA-MI Srl varētu noteikt, vai tā ietilpst to kļūdu kategorijā, uz kurām attiecas garantija.