

ECOSEPTOL FOAM

DEZINFEKCIJAS PUTAS BEZ SPIRTA
VIRSMĀM UN INSTRUMENTIEM

MD SURFACES TREATMENT



■ PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS

- Neitrāls pH šķīdums
- Nesatur fosfātus, EDTA, krāsvielas, smaržvielas
- Gatavs lietošanai
- Pudele ar putu izsmidzinātāju
- Saderība ar plašu materiālu klāstu
- Hlorīdus nesaturošs preparāts
- Aktīvs uz apvalkotiem vīrusiem
- Nodrošina pietiekamu mitruma līmeni, lai novērstu asins un citu bioloģisko materiālu izžūšanu uz instrumentiem,
- Kontaminētu instrumentu glabāšana putās līdz 72 stundām.



Fb Franklab®
notre expertise l'Ultra-Propreté



MANUAL
TREATMENT



READY-TO-
USE

CE
0459

www.sterifrance.com

ECOSEPTOL FOAM

DEZINFEKCIJAS PUTAS BEZ SPIRTA

■ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

■ Pirms pirmās lietošanas :

- Atbloķējiet aerosolu

■ Lietošana:

- 1- Vienmēri izsmidziniet **Ecosseptol FOAM** tieši uz virsmas vai uz sausas vienreizlietošanas salvetes.
- 2- Noslaucīt virsmu ar salveti.
- 3- Saskaņot laiks: atbilstoši vēlamajai pretmikrobu aktivitātei (skatīt dezinfekcijas īpašības) .
- 4- Neskalojiet.
- 5- Nav nepieciešama skalošana, ja vien tas nav norādīts seguma ražotāja instrukcijās, vai saskaroties ar ādu vai gļotādām.
- 6- Instrumentiem - skatīt protokolu.

■ DEZINFEKCIJAS ĪPAŠĪBAS

Aktivitāte	Standarts	Kontakta laiks
Baktericidāls,	EN 13727	5 min.
	EN 13697	5 min.
	EN 1276	2 min.
Mikobaktericīds	EN 14348	10 min.
Pretraugu	EN 13624	5 min.
	EN 13697	5 min.
	EN 1650	5 min.
	EN 14562	10 min.
Fungicidāls	EN 13624	15 min.
	EN 13697	15 min.
	EN 1650	15 min.
Virucidāls	EN 14476 + A2 (Vaccinia Virus)	5 min.
	EN 14476 PRV (hepatitis B virus model) BVDV (hepatitis C virus model)	5 min.
	EN 14476 (Rotavirus)	5 min.
Sporicidāls	EN 13704 Clostridium Difficile	15 min.
	EN 17126 Clostridium Difficile	15 min.

■ PIESARDZĪBA LIETOŠANĀ

Skatīt DDL (FS230)

■ RAKSTURLIELUMI

- Plūstošs putu šķidrums
- pH : 6

■ SASTĀVS

- QAS 0,045%
- Nejonu virsmaktīvās vielas
- diamīns, tenzīdi
- Sekvestranti
- Palīgvielas

■ IEPAKOJUMS

levērojiet lietošanas piesardzības pasākumus. Pirms lietošanas izlasiet etiķeti un informāciju par produktu. Iļb klases medicīnas ierīce.

