


ENZYMEX L9

FERMENTATĪVS DEZINFEKCIJAS
LĪDZEKLIS MEDICĪNISKO IERĪČU
IEPRIEKŠĒJAI DEZINFEKCIJAI

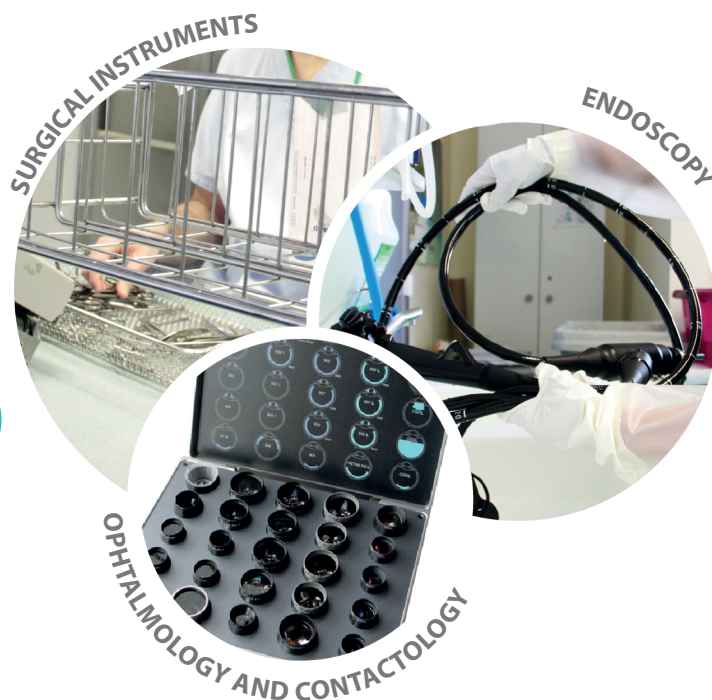

INDIKĀCIJAS

- Operāciju zāle, endoskopija, oftalmoloģija un kontaktlēcas

PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS

- Trīs-fermentatīvais komplekss (lipāze, amilāze un proteāze) apvienojumā ar efektīvām virsmaktīvām vielām
- Instrumentu integritāte garantēta 72 stundas pie iegremdēšanas vannā
- Var izmantot ultraskaņas tvertnē
- Tuberkulocidāls
- Pierādīta bioplēves efektivitāte

Fb Franklab®
notre expertise l'Ultra-Propreté



CE
0459



ENZYMEX L9

FERMENTATĪVS DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS MEDICĪNISKO IERĪČU IEPRIEKŠĒJAI DEZINFEKCIJAI

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Priekštīrīšanas vannas sagatavošana:

- Valkājiet piemērotus individuālās aizsardzības līdzekļus (skatīt drošības datu lapu)
- Atšķaida attiecīgo ENZYMEX L9 tilpumu uz 5L ūdens un homogenizē šķīdumu (skatīt tabulu atšķaidīšanai).

		darba šķīduma koncentrācija		
		0.5%	2%	5%
5L		25 ml	100 ml	250 ml

Lietošana:

- 1- Kontaminētiem instrumentiem jābūt pilnībā iegremdētiem
 - 2- Skrubējiet medicīniskās ierīces un, ja nepieciešams, izmantojiet suku
 - 3- Saskaņā ar laiku: atbilstoši vēlamajai pretmikrobu aktivitātei (skatīt dezinfekcijas īpašības)
 - 4- Rūpīgi nokalojiet
- Atjaunojiet vannu katrai lietošanas reizei

DEZINFEKCIJAS ĪPAŠĪBAS

Aktivitāte	Standards	Koncentrācija	Kontakta laiks
Baktericidāls	EN 13727 +A1	0.5%	5 minūtes
	EN 14561	0.5%	10 minūtes
Yeasticidāls	EN 13624	0.5%	5 minūtes
	EN 14562	0.5%	10 minūtes
Virucidāls	EN 14476 + A2 (<i>Herpes Virus</i>)	0.5%	5 minūtes
	EN 14476 + A1 (<i>DBV Virus</i> <i>Hepatitis C model, HIV Virus</i>)	0.5%	10 minūtes
	EN 17111 (<i>Vaccinia Virus</i>)	0.5%	10 minūtes
Tuberculocidāls	EN 14348	2%	60 minūtes
		5%	10 minūtes
	EN 14563	2%	60 minūtes
		5%	10 minūtes

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Forma : Šķīdums
- Krāsa: **zaļa**
- pH 0.5%: **7.5**
- Derīgums: **2 gadi**

Skatīties DDL

SASTĀVS

- Nejonu virsmaktīvās vielas
- QAS
- Enzīmi: lipāze, amilāze, proteāze
- Sekvestranti

IĒPAKOJUMS

- 1 iepak. 250 devas pa 25mlref. **1043547**
- 2 iepak. 12 x1Lref. **1043516**
- 3 iepak. 4 x 5Lref. **1043520**



Hazardous product - Follow precautions of use. Read label and product information before use. Medical device Class IIb.