


ECOSEPTOL FOAM

DEZINFEKCIJAS LĪDZEKĻA PUTAS BEZ SPIRTA

LIETOŠANAS PROTOKOLS

MEDICĪNISKO IERĪČU PIRMAPSTRĀDE

1

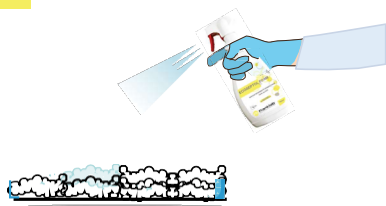

Apsmidziniet mērcēšanas paplātes dibenu ar Ecoseptol putām.

2




Levietojiet savāktos instrumentus mērcēšanas paplātē.

3



Visus instrumentus pārklājiet ar putām un uzlieciet vāku uz paplātes.

4

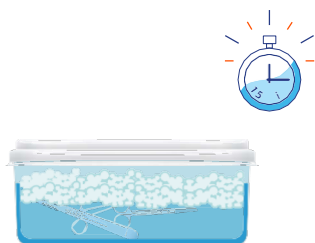

Ļaujiet mērcēties vismaz 15 minūtes. Atļauts turēt putas līdz 72 stundām

5



Noņemiet instrumentus no paplātes un rūpīgi izskalojiet ar ūdeni no ūdensvada.

6

Turpiniet tīrīšanas un sterilizēšanas posmu, balstoties uz izveidoto iekšējo protokolu.