

# FB WIPES

## TĪRĪŠANAS UN DEZINFEKCIJAS SALVETES



### ■ PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS

- Tādu virsmu un medicīnisko ierīču apstrāde, kuru mērķis ir kontrolēt ar vidi saistītos mikrobioloģiskos riskus (piemēram, gulta, operāciju galds, monitori, hemodialīzes ģeneratori, respiratori, zobārstniecības vienības)
- Pielāgots uz lielām virsmām (FB salvetes XXL)
- pH-neitrāls impregnēšanas šķīdums bez smaržvielām
- Efektīvs pret apvalkotiem vīrusiem
- Iedarbojas uz *Bacillus subtilis* un *Clostridium difficile* sporām
- Savietojams ar plašu materiālu klāstu, ieskaitot sintētiskos pārklājumus

FOOD CONTACT

## TĪRĪŠANAS UN DEZINFEKCIJAS SALVETES

### LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

#### Pirms lietošanas:

- Uzvelciet cimdus un noņemiet vāku.
- Izņemiet vienu salveti ar vienu roku, **turot iepakojumu ar otru roku.**

#### Lietot:

- Notīriet zonu, paņemot rik daudz salvešu, cik nepieciešams
- Pārliecinieties, ka kontakta laiks atbilst vēlamajai pretmikrobu aktivitātei.
- Pēc lietošanas cieši aizveriet iepakojumu. Nelietojiet salveti atkārtoti.

Nav nepieciešama skalošana, arī ja ir saskare ar pārtikas precēm.

### DEZINFEKCIJAS ĪPAŠĪBAS

Aktivitāte	Standarts	Kontakta laiks
Baktericidāls	EN 1276 / EN 13727 / EN 13697	1 min
	EN 16615	2 min
	EN 14561	5 min
Raugus iznīcin.	EN 13624 / EN 1650	1 min
	EN 16615	2 min
	EN 13697 / EN 14562	5 min
Fungicīds	EN 13697	5 min
	EN 1650 / EN 13624 / EN 14562	10 min
Virucidāls	EN 14476 <i>Rotavirus, PRV (hepatitis B paraugvīruss), DBV (hepatitis C paraugvīruss), VRS Virus</i>	5 min
	EN 14476 <i>Vaccinia Virus</i>	5 min
Sporicidāls	EN 13704 <i>B.subtilis un Clostridium difficile</i>	15 min

### PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Skatīt drošības datu lapu (FS 010785)

#### RAKSTURLIELUMI

- Salvešu izmēri: **FB wipes (200 x 200 mm)**      **FB wipes XXL (240 x 300 mm)**
- pH impregnētajam šķīdumam : 6
- Derīguma termiņš : **3 gadi**

#### SASTĀVS

- Nejonu virsmaktīvās vielas
- Kvartārie amonija savienojumi

### IĒPAKOJUMS

#### FB Wipes

1 kaste 12 iepak. pa 100 salv .....ref. **10785142**

#### FB Wipes XXL

2 kaste 12 iepak. pa 60 salv.....ref. **10785145**



Use biocides with care. Read the label and product information before use.