

PERALEX 9 Hecto +

LIETOŠANAI GATAVS
DEZINFEKCIJAS
LĪDZEKLIS UZ
PERETIŅSKĀBES BĀZES



- **PIELIETOŠANA**
- Operāciju zāle, endoskopija, optiskās iekārtas
- **PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS**
 - Gatavs lietošanai (bez aktivatora)
 - Augsta līmeņa dezinfekcija 10 minūšu laikā
 - Saderība ar materiāliem, ko izmanto endoskopa dezinfekcijas stendos, jo īpaši corian
 - Nesatur aldehīdus: nav proteīnu fiksācijas



Fb Franklab®
notre expertise l'Ultra-Propreté



READY
TO USE

CE
0459

LIETOŠANAI GATAVS DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS UZ PERETIĶSKĀBES BĀZES

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Dezinfekcijas vannas sagatavošana:

- Valkājiet atkārtoti lietojamus cimodus ar garām piedurknēm, aizsargbrilles, priekšautu un masku
- Plelejjiet nepieciešamo lietošanai gatavā šķīduma daudzumu vannā tā, lai dezinficējamā iekārta būtu pilnībā iegremdēta

Lietot:

- 1- iegremdējiet dezinficējamo medicīnisko ierīci
- 2- cirkulējiet dezinfekcijas līdzekli endoskopu kanālos
- 3- kontakta laiks - 10 minūtes
- 4- rūpīgi izskalojiet ar mikrobioloģiski kontrolētu ūdeni

Atjaunojiet vannu ik pēc 7 dienām. Pārbaudiet dezinfektanta stabilitāti katru rītu pirms pirmās lietošanas reizes ar PERATET 500 sloksni (Materiāla tehniskā informācija 760_P9H+).

MIKROBIOLOĢISKĀ AKTIVITĀTE

Aktivitāte	Standarts	Kontakta laiks
Baktericīds	EN 13727	1 min
	EN 14561	5 min
Fungicīds	EN 13624 / EN 14562	5 min
Virucidāls	EN 14476	10 min
	EN 17111	5 min
Mikobaktericidāls	EN 14348 / EN 14563	10 min
Sporicidāls	EN 14347	10 min
	EN 17126	10 min
Sporicidāls iesk. C. difficile	EN 17126	10 min

LIETOŠANAS PIESARDZĪBA

Skatīt drošības datu lapu (DDL 010474)

RAKSTURLIELUMI

- šķidrums
- pH : 2,5
- krāsa: : bezkrāsains
- derīguma termiņš: 1 gads

SASTĀVS

- Peretiķskābe
- Ūdeņraža peroksīds
- Etiķskābe

IĒPAKOJUMS

① KASTE 4 x 5 L kannas.....ref. **1047420**



Hazardous product - follow the precautions of use. Always read the label and product information before use. Class IIb medical device