

# ECOSEPTOL FOAM

DEZINFEKCIJAS PUTAS BEZ SPIRTA

MD SURFACES TREATMENT



## ■ PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS

- Neitrāls pH šķīdums
- Nesatur fosfātus, EDTA, krāsvielas, smaržvielas
- Gatavs lietošanai
- Pudele ar putu izsmidzinātāju
- Saderība ar plašu materiālu klāstu
- Hlorīdus nesaturošs preparāts
- Aktīvs uz apvalkotiem vīrusiem

**Fb Franklab®**  
notre expertise l'Ultra-Propreté



MANUAL  
TREATMENT



READY-TO-  
USE

CE  
0459



# ECOSEPTOL FOAM

## DEZINFEKCIJAS PUTAS BEZ SPIRTA

### LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

#### Pirms pirmās lietošanas :

- Atbloķējiet aerosolu

#### Lietošana:

- Vienmēri izsmidziniet **Ecoseptol FOAM** tirši uz virsmas vai uz sausas vienreizlietošanas salvetes.
- Noslaucīt virsmu ar salveti.
- Saskares laiks: atbilstoši vēlamajai pretmikrobu aktivitātei (skatīt dezinfekcijas īpašības).
- Neskalojiet.
- Nav nepieciešama skalošana, ja vien tas nav norādīts seguma ražotāja instrukcijās, vai saskaroties ar ādu vai gļotādām.
- Atkārtot pēc vajadzības

### DEZINFEKCIJAS ĪPAŠĪBAS

Aktivitāte	Standarts	Kontakta laiks
<b>Baktericidāls</b>	EN 13727	5 min.
	EN 13697	5 min.
	EN 1276	2 min.
	EN 14561	10 min.
<b>Pretraugu</b>	EN 13624	5 min.
	EN 13697	5 min.
	EN 1650	5 min.
	EN 14562	10 min.
<b>Fungicidāls</b>	EN 13624	15 min.
	EN 13697	15 min.
	EN 1650	15 min.
<b>Virucidāls</b>	EN 14476 + A2 (Vaccinia Virus)	5 min.
	EN 14476 PRV (hepatitis B virus model) BVDV (hepatitis C virus model)	5 min.
	EN 14476 (Rotavirus)	5 min.
	<b>Sporicidāls</b>	EN 13704 Clostridium Difficile
	EN 17126 Clostridium Difficile	15 min.

### PIESARDZĪBA LIETOŠANĀ

Skatīt DDL (FS230)

### RAKSTURLIELUMI

- Plūstošs šķidrums
- pH : 6

### SASTĀVS

- Katjonu virsmaktīvās vielas
- Nejonu virsmaktīvās vielas
- Hlorheksidīna diglukonāts
- Sekvestranti
- Palīgvielas

### IETAKOJUMS

- 1 kastē 12 spreji 750 mL.....ref. **23030**

Fleverojet lietošanas piesardzības pasākumus. Pirms lietošanas izlasiet etiķeti un informāciju par produktu. Iib klases medicīnas ierīce.

