

# VIROSPRAY

SPORICĪDS MAZGĀŠANAS UN  
DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS

SURFACE TREATMENT OF MD



## ■ PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS

- Medicīnisko ierīču tīrīšana un dezinfekcija
- Augsta limeņa dezinfekcijas aktivitāte\*
- Virsmas, kas saskaras ar pārtiku, pēc apstrādes skalot ar ūdeni
- Aktīvs uz *Clostridium difficile*

NESATUR QAS

\*Skatīt dezinfekcijas līdzekļa īpašības aizmugurē

**Fb** **Franklab**<sup>®</sup>  
notre expertise l'Ultra-Propreté



MANUAL  
TREATMENT

READY-TO-  
USE

CE  
0459



www.sterifrance.com

# VIROSPRAY

## SPORICĪDS LĪDZEKLIS

### LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

- Pirms pirmās lietošanas atbloķējiet aerosolu.

#### Lietošana :

- 1- Vienmērīgi izsmidziniet VIROSPRAY uz sausas, neaustas vienreizējas lietošanas salvetes
- 2- Noslaukiet apstrādājamās medicīniskās ierīces virsmu
- 3- Kontakta laiks: Saskaņā ar vēlamo antimikrobiālo aktivitāti
- 4- Neskalot virsmas\*

\*Nav nepieciešama skalošana, ja vien apstrādātā virsmas pārklājuma ražotājs nav norādījis citādi vai virsmām, kas saskaras ar gļotādu

- 5- Izmetiet salveti
- 6- Ja nepieciešams, atkārtojiet darbību

### DEZINFEKCIJAS ĪPAŠĪBAS

Aktivitāte	Standarts	Kontakta laiks*
<b>Bactericidāls</b>	EN 13727	2 min. (cc)/ 5 min. (dc)
	EN 1276	5 min (dc)
	EN 13697	5 min (dc)
	EN 14561	5 min. (cc un dc)
<b>Raugus iznīcinošs</b>	EN 13624	5 min. (cc un dc)
	EN 1650	5 min (dc)
	EN 13697	5 min (dc)
	EN 14562	5 min. (cc) / 10 min. (dc)
<b>Fungicidāls</b>	EN13624	5 min. (cc) / 10 min. (dc)
	EN 14562	5 min. (cc) / 10 min. (dc)
<b>Virucidāls</b>	EN 14476 <i>Murine Norovirus</i>	2 min (cc) un 5 min (dc)
	EN 14476 <i>Adenovirus</i>	5 min (cc) un 10 min (dc)
	EN 14476 <i>Poliovirus</i>	5 min (cc) un 10 min (dc)
	EN 14476 <i>Active on Rotavirus</i>	10 min (dc)
<b>Tuberculocidāls</b>	EN14348 <i>Mycobacterium terrae</i>	5 min (cc) /10 min (dc)
	EN 14563 <i>Mycobacterium terrae</i>	5 min (cc)
<b>Mycobactericidāls</b>	EN14348 <i>Mycobacterium avium</i>	10 minutes (cc)
<b>Sporicidāls</b>	EN 17126 <i>Bacillus subtilis</i>	10 min (cc)
	EN 17126 <i>Bacillus cereus</i>	15 min (cc)
	EN 13704 <i>Clostridium difficile</i>	15 min (dc)

\*Testi, kas veikti tiros apstākļos (cc) un/vai netiros apstākļos (dc)

### LIETOŠANAS PIESARDZĪBA

Refer to the Safety Data Sheet (SDS 231M)

- Šķidrums šķīdums
- pH : 7

#### SASTĀVS:

- Amfotēriskās virsmaktīvās vielas
- Alkilamīna hidrospirta šķīdums
- Palīgvielas

### IEPAKOJUMS

- ① kaste 6 X 1L .....ref. **23140M57**
- ② kaste 4 x 5L kannā.....ref. **23150M**



Hazardous product - Follow the precautions of use. Read the label and product information before use. Class IIb medical device.