



ENZYMEX L9

Enzymex L9 ir fermentu dezinfekcijas mazgāšanas līdzeklis medicīnas ierīču pirmsdezinfekcijai.

Produkta apraksts

- Enzymex L9 ir enzīmu mazgāšanas līdzeklis medicīnas ierīču iepriekšējai dezinfekcijai iegremdēšanas vannā.
- Enzymex L9 ir komplekss trienzīmu (lipāze, amilāze un proteāze), kas apvienots ar efektīvām virsmaktīvajām vielām.
- Instrumenta integritāte garantēta 72 stundas iegremdēšanas vannā
- Pierādīta efektivitāte pret bioplēvi ISO/TS 15883:5:2021

- Tuberkuloīdā aktivitāte

Pieteikums

- Enzymex L9 var izmantot operāciju zālē, endoskopēšana, oftalmoloģija un kontaktlēcas

- Var izmantot ultraskaņas tvertnē

Sastāvs

- Nejonu virsmaktīvās vielas
- Četraizvietas amonijs
- Fermenti: lipāze, amilāze un proteāze.

- Sekvestranti, korozijas inhibitori

Raksturojums

- Zaļš šķidrums
- pH 0,5 %: 7.5
- Derīguma termiņš: 2 gadi pēc izgatavošanas

Lietošanas piesardzības pasākumi

Skatīt drošības datu lapu

Uzglabāšanas apstākļi

- Uzglabāšana 5-25°C temperatūrā
- Uzglabāt trauku cieši noslēgtu un labi vēdināmā vietā.
- Glabājiēt vēsumu.
- Aizsargājiēt no saules gaismas.
- Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā un vertikālā stāvoklī.

Metāls Nerūsējošais tērauds
Plastmasa PSU, PVC, PE
Citi materiāli Keramikā

Padomi Lietošana paredzētajā veidā nekaitēs materiāliem.
Skatīt produkta tehnisko lapu

Ievērojiet šādus lietošanas piesardzības pasākumus. Pirms lietošanas

izlasiet etiķeti un informāciju par produktu. IIB klases medicīniskās ierīces.

Lietošanas instrukcija

Priekšattīrīšanas vannas sagatavošana:

- Lietojiet piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus (skatīt drošības datu lapu).
- Atbilstošu **ENZYMEX L9** tilpumu atšķaidiet 5 l ūdens un homogenizējiet šķīdumu (skatīt atšķaidījumu tabulu).

Piemēri 5 litru darba šķīduma pagatavošanai

Vēlamā koncentrācija	Koncentrāts uz 5 litriem ūdens	Sagatavotais apjoms
0.05%	25 ml	5 litru tilpums
2.0%	100 ml	5 litru tilpums
5%	250 ml	5 litru tilpums

Lietošana:


- Netīri instrumenti ir kārtīgi iegremdējami.
- Notīriet medicīniskās ierīces un, ja nepieciešams, izmantojiet tamponu.
- Saskares laiks: atkarībā no vēlamās antimikrobiālās aktivitātes (skatīt dezinfekcijas īpašības).
- Rūpīgi noskalojiet atjaunojiet vannu kad tā ir redzami netīra vai katru darba dienu

Sertifikācija

Enzymex L9 ir IIB klases medicīnas ierīce un ir marķēta ar CE marķējumu saskaņā ar Direktīvu 93/42/EK. CE 0459

Ekspertu atzinumi un papildu informācija

- Enzymex L9 ir novērtējušas neatkarīgas laboratorijas.
- Lai saņemtu sīkāku informāciju par ekspertu atzinumiem, vairāk informācijas produktu vai individuālus jautājumus, sazinieties ar mums pa e-pastu (medilink@medilink.lv) vai tālruni (+37167840380).
- Franklab ir GMP ražošanas sertifikāts un sertificēts EN ISO 13485 sertifikāts, un EN ISO 26000 sertifikāts

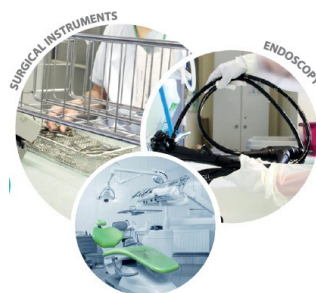

Iepakojums un pasūtīšana

Viena iepakojuma	Vienības kartona kārbā	Produkta numurs
25 ml	250	AIR_10-43547
1 litra pudele	12	AIR_10-43516
5 litru kannā	4	AIR_10-43520

Izplatītājs: SIA "Medilink", Višķu iela 2, k1, Rīga, LV-1063, +37167840380, medilink@medilink.lv



Ražotājs: Franklab
3 av. des Frères 8180 MONTIGNY LE BRETONNEUX FRANCE Tel: +33
(0) 1 39 44 93 40 Fakss: +33 (0) 1 39 44 93 41
www.franklab.fr



ENZYMEX L9

Enzymex L9 ir fermentu dezinfekcijas mazgāšanas līdzeklis medicīnas ierīču pirmsdezinfekcijai.

Dezinfekcijas īpašības

Standarta	Celms	Koncentrācija	Kontakta laiks
Baktericīds			
EN 13727	<i>S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae</i>	0.5%	5 minūtes
EN 14561	<i>S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae</i>	0.5%	10 minūtes
Sēnes, Raugi			
EN 13624	<i>C. albicans</i>	0.5%	5 minūtes
EN 14562	<i>C. albicans</i>	0.5%	10 minūtes
Vīrusi			
EN 14476+ A2	<i>Herpes, polio vīruss</i>	0.5%	5 minūtes
EN 14476+ A1	<i>DBV vīruss, C hepatīta modelis, HIV vīruss</i>	0.5%	10 minūtes
EN 17111	<i>Vakcīnijas, Adeno vīruss</i>	0.5%	10 minūtes
Tuberkulocīds			
EN 14348 : 2005	<i>Mycobacterium terrae</i>	5%	10 minūtes
		2%	60 minūtes
NF EN 14563 : 2009	<i>Mycobacterium terrae</i>	5%	10 minūtes
		2%	60 minūtes



1-litrs



250 ml



5 litri

