


INSTRULYSE

MAZGĀŠANAS UN DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS
MEDICĪNAS IERĪČU PIRMSDEZINFEKCIJAI UN
DEZINFEKCIJAI

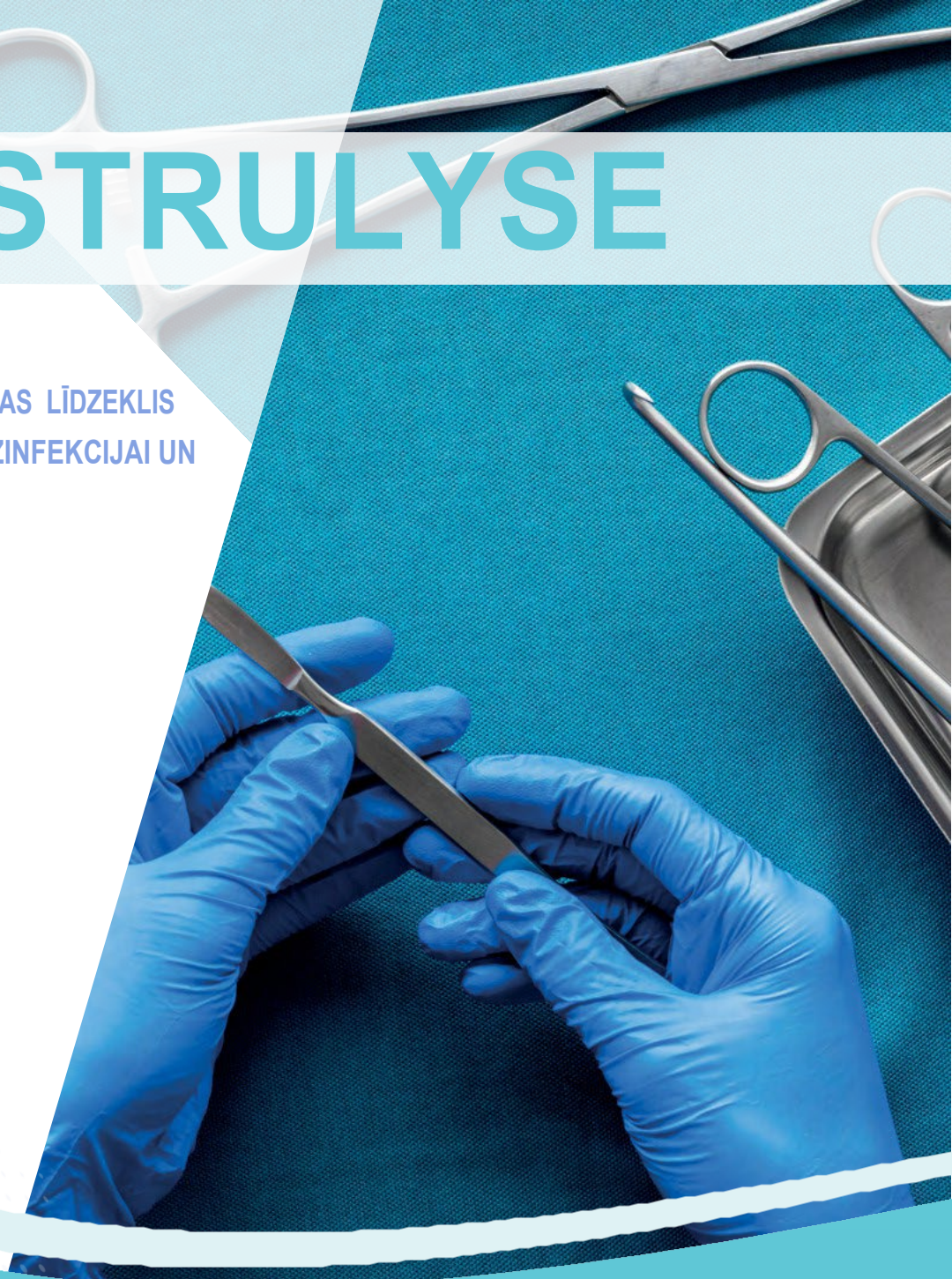

■ PIELIETOŠANAS SFĒRAS

- Operāciju zāle, endoskopija, oftalmoloģija

■ PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS

- Bez QAS, fosfātiem, to atvasinājumiem, fenola, EDTA un CMR.
- Pierādīta iedarbība uz biofilmu (*Pseudomonas aeruginosa*)
- Korozija risku kontrole pat cieta ūdens apstākļos
- Var izmantot ultraskaņas tīrīšanas iekārtās
- 0,4 % formulējums pirmsdezinfekcijai un dezinfekcijai



INSTRULYSE

MAZGĀŠANAS UN DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS MEDICĪNAS IERĪČU DEZINFEKCIJAI

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

■ Šķīduma pagatavošana:

- Lietojiet piemērotu individuālo aizsardzības aprīkojumu
- Atšķaidiet 20ml INSTRULYSE ar 5l ūdens

■ Lietošana :

- 1- Pilnībā iegremdējiet netīrās ierīces vannā.
- 2- Skrūvējiet medicīniskās ierīces un, ja nepieciešams, izmantojiet birstes.
- 3- Kontakta laiks : 15 minūtes
- 4- Rūpīgi noskalojiet ar ūdeni.

Vanna jāatjauno vismaz reizi 24 stundās un katru reizi, kad tā ir makroskopiski netīra.

MIKROBIOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Darbība	Standarti	Šķirnes	Koncentrācija	Kontakta laiks
Baktericīds	EN 13727	<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	0.4%	15 minūtes
Tuberkulocīds	EN 14561	<i>Mycobacterium terrae</i>	0.4%	15 minūtes
	EN14348	<i>Mycobacterium terrae</i>	1%	15 minūtes
	EN14563	<i>Mycobacterium Avium</i>	1%	15 minūtes
Yeasticidal	EN 13624	<i>Candida albicans</i>	0.4%	15 minūtes
	EN 14562	<i>Candida albicans</i>	0.4%	15 minūtes
Virusicīds pret apvalkotiem vīrusiem (1)	EN 17111	Vakcinācijas, polio, adeno vīruss	0.4%	15 minūtes
Aktīvs PRV, DBV	EN 14476	PRV vīruss (B hepatīta modeļa vīruss), DBV vīruss (C hepatīta modeļa vīruss)	0.4%	15 minūtes

(1) tests, kas attiecas uz virucidālo aktivitāti pret apvalkotiem vīrusiem (vakcinācijas vīruss), ir reprezentatīvs attiecībā uz apvalkotiem vīrusiem, kas norādīti standarta EN 17111 pielikumā, piemēram, B hepatīta vīruss (HBV), C hepatīta vīruss (HCV), HIV, Herpesviridae (herpes vīruss, trakumseras vīruss)

LIETOŠANAS PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Skatiet drošības datu lapu

ĪPAŠĪBAS

- Izskats : šķidr
- pH 0,4% : 9
- Krāsa : no bezkrāsainas līdz dzeltenai, oranžai

SASTĀVS

- Alkilamīns
- Nejonu virsmaktīvās vielas
- Viegli bioloģiski noārdāmi sekvestranti

IEPAKOJUMS

- 1 Kastīte ar 500 devām pa 20 mlref. 12010
- 2 12 x 1 L kasteref. 12040
- 3 Kaste 4 x 5 Lref. 12050SP



Produkts profesionālai lietošanai - ievērojiet lietošanas piesardzības pasākumus. Pirms lietošanas izlasiet etiķeti un informāciju par produktu. IIb klases medicīnas ierīce