

# LUBRIX *Spray*

UZ PARAFĪNA EĻĻAS  
BĀZĒTS LUBRIKANTS  
ĶIRURĢISKIEM  
INSTRUMENTIEM

SURGICAL INSTRUMENTS



## ■ PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS

- Manuāla ķirurģisko instrumentu savienojumu vietu eļļošana
- Efektīvi novērš melnos plankumus, kas rodas slihta ūdens kvalitātes dēļ
- Piedod apstrādātām virsmām mirdzumu
- Garantēta viegla un precīza instrumentu apkope



**Fb Franklab**<sup>®</sup>  
notre expertise l'Ultra-Propreté



gatavs  
lietošanai

# LUBRIX Spray

## UZ PARAFĪNA EĻĻAS BĀZĒTS LUBRIKANTS ĶIRURĢISKIEM INSTRUMENTIEM

### LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

#### Pirms lietošanas:

- Valkājiet aizsargcimdus/acu aizsargus
- Novietojiet izpildmehānismu vārsta augšpusē

#### Lietošanas instrukcija:

- 1- Pirms lietošanas sakratiet aerosolu
- 2- Turiet aerosolu vertikāli un mērķtiecīgi pulverizējiet instrumentu savienojumus ar īsu spiedienu
- 3- Vairākas reizes atkārtojiet pulverizāciju, lai nodrošinātu labu produkta izplatīšanos
- 4- Novietot instrumentu uz sausas salvetes

### LIETOŠANAS NOTEIKUMI

- eļļa konvencionālu instrumentu kustīgo daļu kopšanai
- eļļa rotējošo instrumentu kopšanai

Skatīt DDL

### ĪPAŠĪBAS

- Šķidrums
- krāsa: bezkrāsains
- pH: 6.5
- Uzglabāšana pēc atvēršanas: 2 years

### SASTĀVS

- Attīrīta parafīna eļļa
- Emulgators
- Propelants: slāpekļis

### IEPAKOJUMS

- ① Box 4 aerosol 400ml .....ref. 1032856



Hazardous product - Follow precautions of use. Always read label and product information before use.