

VIROSPRAY

SPORICĪDS MAZGĀŠANAS UN
DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS

SURFACE TREATMENT OF MD



SPRAY



■ PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS

- Medicīnisko ierīču tīrīšana un dezinfekcija
- Augsta līmeņa dezinfekcijas aktivitāte*
- Virsmas, kas saskaras ar pārtiku, pēc apstrādes skalot ar ūdeni
- Aktīvs uz *Clostridium difficile*

NESATUR QAS

*Skatīt dezinfekcijas līdzekļa īpašības aizmugurē

Fb Franklab®
notre expertise l'Ultra-Propreté



READY-TO-
USE

CE
0459



www.sterifrance.com

VIROSPRAY

SPORICIDS LĪDZEKLIS

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

- Pirms pirmās lietošanas atbloķējiet aerosolu.

Lietošana :

- Vienmērīgi izsmidziniet VIROSPRAY uz sausas, neaustas vienreizējas lietošanas salvetes
- Noslaukiet apstrādājamās medicīniskās ierīces virsmu
- Kontakta laiks: Saskaņā ar vēlamo antimikrobiālo aktivitāti
- Neskalot virsmas*

*Nav nepieciešama skalošana, ja vien apstrādātā virsmas pārklājuma ražotājs nav norādījis citādi vai virsmām, kas saskaras ar gļotādu

- Izmetiet salveti
- Ja nepieciešams, atkārtojiet darbību

DEZINFEKCIJAS ĪPAŠĪBAS

Aktivitāte	Standarts	Kontakta laiks*
Bactericidāls	EN 13727	2 min. (cc) / 5 min. (dc)
	EN 1276	5 min (dc)
	EN 13697	5 min (dc)
	EN 14561	5 min. (cc un dc)
Raugus iznīcinošs	EN 13624	5 min. (cc un dc)
	EN 1650	5 min (dc)
	EN 13697	5 min (dc)
	EN 14562	5 min. (cc) / 10 min. (dc)
Fungicidāls	EN13624	5 min. (cc) / 10 min. (dc)
	EN 14562	5 min. (cc) / 10 min. (dc)
Virucidāls	EN 14476 <i>Murine Norovirus</i>	2 min (cc) un 5 min (dc)
	EN 14476 <i>Adenovirus</i>	5 min (cc) un 10 min (dc)
	EN 14476 <i>Poliovirus</i>	5 min (cc) un 10 min (dc)
	EN 14476 <i>Active on Rotavirus</i>	10 min (dc)
Tuberculocidāls	EN14348 <i>Mycobacterium terrae</i>	5 min (cc) / 10 min (dc)
	EN 14563 <i>Mycobacterium terrae</i>	5 min (cc)
Mycobactericidāls	EN14348 <i>Mycobacterium avium</i>	10 minutes (cc)
Sporicidāls	EN 17126 <i>Bacillus subtilis</i>	10 min (cc)
	EN 17126 <i>Bacillus cereus</i>	15 min (cc)
	EN 13704 <i>Clostridium difficile</i>	15 min (dc)

*Testi, kas veikti tiros apstākļos (cc) un/vai netiros apstākļos (dc)

LIETOŠANAS PIESARDZĪBA

- Šķidrums šķīdums
- pH : 7

Refer to the Safety Data Sheet (SDS 231M)

SASTĀVS:

- Amfotēriskās virsmaktīvās vielas
- Etanols 70%
- Palīgvielas

IEPAKOJUMS

- kaste 6 X 1Lref. **23140M57**
- kaste 4 x 5L kanna.....ref. **23150M**



Hazardous product - Follow the precautions of use. Read the label and product information before use. Class IIb medical device.