

Īpaši piemērots jūtīgiem
materiāliem Makrolon®,
Plexiglas® and Polysulfon.

Bacillol® 30 Foam

Bez aldehīdiem, ātras iedarbības dezinfekcijas līdzeklis
īpaši jūtīgām virsmām.



Research for infection protection. www.bode-science-center.com



Bacillo® 30 Foam

Produkta īpašības

- gatavs lietošanai
- ātra iedarbība
- izcila materiāla saderība, īpaši piemērots virsmām, kas izgatavotas no Makrolon®, Plexiglas® and Polysulfon
- mirtinošs efekts
- ērts lietošanā
- bez krāsas un smaržas

Sastāvs

Aktīvās vielas:

Etanols 140 mg/g; propan-2-ol 100 mg/g; propan-1-ol 60 mg/g, n-alkil-aminopropyl-glicīns (CAS number 1397 34-65-9) 5 mg/g.



Mikrobioloģiskā aktivitāte

- baktericīds
- Sēnes, raugi
- Virucīds, ieskaitot apvalkotos vīrusus (HBV, HIV, HCV)
- MNV
- Poliomas vīrus
- Rota vīrus

Pielietošana

Bacillo® 30 Foam ir piemērots ātrai virsmu dezinfekcijai ar apsmidzināšanas - ,noslaucīšanas metodi jūtīgām virsmām::

- medicīnas ierīces, kas atbilst medicīnas ierīču direktīvām, virsmām, kas atbilst Biocīdu produktu direktīvām, u.c.
- jūtīgām sintētiska materiāla virsmām, Makrolon®, organiskais stikls un termoplastisks polimērs
- darba virsmām, primārā veselības aprūpē, zobārstniecības kabinetos un ambulancēs, doktorātos, klīnikās
- jomās, kas prasa ātru efektu, ekonomējot laiku
- virsmām, kurām grūti piekļūt: vadi, kabeli, ventili, pogas utt.
- displeji/monitori un klaviatūra, kontroles panelis
- solāriji

Norāde par pielietošanu

Bacillo® 30 Foam ir gatavs lietošanai. Uzklāt uz virsmas un ar vienreizējo salveti noslaucīt. Virsmu turēt mitru visu ekspozīcijas laiku.

- ekspozīcijas laiks cietām virsmām: 30 sekundes

Izmantot piemēroto izsmidzināšanas galviņu, ka palīdz optiski kontrolēt dezinficējamo virsmu.

Dezinfekcijai vertikālām virsmām, piem. displejiem un monitoriem, un nelīdzenās virsmās, piemēram, tastatūras un vadības paneļi, mēs iesakām apsmidzināt ar pietiekamu daudzumu Bacillo® 30 Foam uz tīras vienreizējās drānas, lai pilnībā un rūpīgi noslaucīt virsmu un to dezinficētu. Lūdzu, pārlicinieties, ka neviens dezinfekcijas šķīdums neieklūst ierīces iekšpusē. Vajadzības gadījumā, izlasiet ierīces ekspluatācijas rokasgrāmatu. Nelietojiet dezinfekcijai invazīvās terapijās nodaļās.

Dezinfekcijas līdzeklis nedrīkst pārsniegt 50ml uz 1 kvadrātmetru apstrādājamās virsmas.

Nepieļaut produkta iekļūšanu dzeramajā ūdens sistēmā.

Izmantojiet produktu droši. Pirms lietošanas izlasiet etiķeti.

Ieteikumi aerosolu/salvešu lietošanai dezinfekcijā

Rekomendācijas aerosola/salvešu dezinficēšanai

Ir pierādījies, ka "nedzīvas" virsmas var būt nozīmīgs piesārņojuma vai infekcijas avots (1). Lai novērstu nelielu, grūti pieejamu virsmu iespējamu piesārņojumu un infekcijas izplatīšanu, dezinficēšanu ar salvetēm ideāli papildina dezinficēšana ar aerosolu/slaucīšanu vai dezinficēšana smidzinot (2, 3, 4), izmantojot ātrdarbīgu dezinfekcijas līdzekli uz spirta bāzes. Veicot dezinficēšanu, ir svarīgi pareizi lietot izstrādājumus:

☞ Priekšroka vienmēr jādod dezinficēšanai ar salvetēm nevis dezinficēšanai ar smidzināšanu/slaucīšanu, jo tā novērš aerosolu veidošanos un garantē vislabāko samitrināšanu.

☞ Pēc smidzināšanas, ja tas iespējams, slaukiet virsmu, lai nodrošinātu tās pilnīgu samitrināšanu (smidzināšanas/slaucīšanas dezinficēšanas gadījumā)

☞ Smidzināšanas dezinficēšanas procedūru lietojiet tikai vietām, kuras nav iespējams dezinficēt, lietojot salveti vai smidzināšanas/slaucīšanas dezinficēšanas procedūru.

- ☞ Lai maksimāli novērstu aerosolu ielipošanas risku smidzināšanas laikā, uzklājiet izstrādājumu tieši uz mitras lupatiņas vai smidziniet to uz virsmas no tuva atstatuma
- ☞ Ja iespējams, lietojiet izstrādājumus uz spirta bāzes, kas nesatur piedevas, jo šāds izstrādājums nožūst nestājot nekādas nogulsnes
- ☞ Cita alternatīva ir uz spirta bāzētas dezinficēšanas putas, kas smidzināšanas laikā neveido nekādus aerosolus

1 Weber DJ et al. Role of hospital surfaces in the transmission of emerging health care-associated pathogens: Norovirus, Clostridium difficile, and Acinetobacter species. American Journal of Infection Control, 2010, 38 (5): 25-33.

2 Verbund für Angewandte Hygiene e.V. Desinfektionsmittel-Kommission. Fragen und Antworten zu Maßnahmen der Antiseptik und der chemischen Desinfektion. www.vah-online.de, 2011.

3 Berufsgenossenschaftliche Regel: „Desinfektionsarbeiten im Gesundheitsdienst“ (BGR 206). www.bgw-online.de.

4 Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 525 „Umgang mit Gefahrstoffen in Einrichtungen zur humanmedizinischen Versorgung“. www.baua.de.

Bacillo® 30 Foam

Efektivitāte

Baktērijas un sēnes/raugi		
EN fāze 2 / Solis 1 Efektivitāte saskaņā ar EN normām fāze 2 / Solis 1 (suspensijas tests), Testēts tīros/netīros apstākļos	Baktericīds (EN 13727) - netīrā vidē	30 sec.
	Sēnes/raugi(EN 13624) - netīrā vidē	30 sec.
VAH Sertificēta pielietošanas programma slaučīšanas metodei no lietošās higiēnas asociācijas (VAH). Bāzēta uz suspensijas un praktisko testu testēts uz tīrām virsmām (optiski tīras) /netīras virsmas (redzami netīras)	Baktericīds/sēnes, raugi - netīrā vidē	5 min.
DGHM Ātrā dezinfekcija (saskaņā ar Vācijas Higiēnas un mikrobioloģijas sabiedrību [DGHM]); pamatojoties uz suspensijas un praktisko testu tīros/netīros apstākļos	Baktericīds/sēnes,raugi - netīrā vidē	30 sec.
Vīrusi		
Efektīvs ieskaitot vīrusus (Vācijas vīrusu slimību kontroles asociācija [DVV])	Virucīdals iesk. apvalkotos vīrusus (HBV, HIV, HCV)	30 sec.
Efektivitāte pret neoavkotiem vīrusiem vīrusiem(DVV)	Polyomavirus	5 min.
Efektivitāte pret neoavkotiem vīrusiem (saskaņā ar EN)	MNV - tīrai virsmai - netīrai virsmai Rotavirus	5 min. 10 min. 1 min.
Pārtikas rūpniecība		
EN fāze 2 / 2 fāze 2 / 1 efektivitāte saskaņā ar EN Normām (fāze 2 / 2 un āze 2 / 1), testēts saskaņā ar dažādiem nosacījumiem	Baktericīds (EN 13697 + 1276) - zems, augsts un piena pieārņojums (20 °C)	1 min
	sēnes (EN 13697 + EN 1650) - zems, augsts un piena pieārņojums (20 °C)	1 min
	raugīl (EN 13697 + EN 1650) - zems, augsts un piena pieārņojums (20 °C)	
EN fāze 2 / Solis 2 efektivitāte saskaņā ar EN fāze 2 / Solis 2 (praktiskais tests), restēts saskaņā ar dažādiem nosacījumiem	Baktericīds (EN 13697) - zems, augsts un piena pieārņojums (20 °C)	1 min
	sēnes (EN 13697) - zems, augsts un piena pieārņojums (4°C, 10°C and 20 °C)	1 min
	raugi (EN 13697) - high contamination (20 °C)	
EN fāze 2 / Solis 1 Efektivitāte saskaņā ar EN fāze 2 / solis 1 (suspensijas tests), testēts saskaņā ar dažādiem nosacījumiem	Baktericīdals (EN 1276) - zems, augsts un piena pieārņojums (20 °C)	1 min
	sēnes (EN 1650) - zems, augsts un piena pieārņojums (20 °C)	1 min

Atbilstība

- Praktiskās higiēnas asociācijas izsniegts sertifikāts (VAH)
- CE-marķējums saskaņā ar Medicīnisko ierīču direktīvām (MDD)

Ķīmiski fizikālie dati

- Aizdeģšanās punkts (DIN 51755) 30 °C
- Blīvums(20 °C) apm.. 0.96 g/cm³
- pH (20 °C) apm.. 8
- Refrakcijas indekss n_D²⁰ apm. 1.36

Stabilitāte

- Pēc atvēršanas: 12 months



Iepakojums

750 ml pudele*, 5 liru kannā un 200 litru muca

* pērkot 8 pudeles ar 2 izsmidzinātāji līdzī vai arī 8 pudeles bez izsmidzinātāja

Zināšanai: ieteikumi par mūsu preparāti ir balstīti uz zinātniskiem testiem un godprātīga. Detalizētāki ieteikumi, piem par materiāls saderību, ir iespējama tikai atsevišķos, atsevišķos gadījumos. Mūsu ieteikumi nav saistoši un nav uzskatāms par garantiju. Tie neliedz uzņēmuma paša testēšanu paredzētajam nolūkam un procesu. Šajā ziņā mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību. Tas ir saskaņā ar mūsu vispārējiem pārdošanas nosacījumiem un piegādes.

Supported by comprehensive proofs of efficacy and scientific-based research and development,
our hygiene and disinfection products ensure best possible quality.

Research for infection protection. www.bode-science-center.com



BODE Chemie GmbH

Melanchthonstr. 27 • 22525 Hamburg • Germany • Tel. +49 40 54006-0 • Fax +49 40 54006-200
www.bode-chemie.com • info@bode-chemie.de

A company of the HARTMANN GROUP