

VIRO'WIPES

SALVETES, PIESŪCINĀTAS AR SPORICĪDU
MAZGĀŠANAS UN DEZINFEKCIJAS ŠĶĪDUMU

MD TREATMENT



WIPES



■ PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS

- Aktīvs no 2 min. (EN16615)
- Medicīnisko ierīču tīrīšana un dezinfekcija
- Augsta līmeņa dezinfekcijas aktivitāte* (impregnētajam šķīdumam)
- Saskaņā ar pārtiku eso' do virsmu tīrīšana un dezinfekcija
- Aktīvs uz *Clostridium Difficile* (impregnētajam šķīdumam)
- Nesatur QAS

QUATERNARY
AMMONIUM
FREE

*See disinfectant properties on the back

Fb Franklab®
notre expertise l'Ultra-Propreté

lietošanai
gatavas

CE
0459

MANUAL
TREATMENT



VIRO'WIPES

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1 pirms pirmās lietošanas:

- noņemiet vāku un aizsargplombu
- ievietojiet pirmo salveti no rullīša centra caur vāka padeves dozatoru.

Lietošana:

- 1- Izmantojot jaunu salveti, rūpīgi notīriet un dezinficējiet nepieciešamo virsmu.
- 2- Saskates laiks: ievērojiet kontakta laiku atbilstoši nepieciešamajai pretmikrobu aktivitātei
- 3- Neskalot*
- * *izņemot, ja ir saskare ar ādu vai gļotādu.*
- 4- Aizveriet vāku pēc katras lietošanas reizes

DEZINFEKCIJAS ĪPAŠĪBAS

Aktivitāte	Standarts	Kontakta laiks*
Baktericidāls (1)(2)	EN 1661512i	2 min. (dc)
	EN 13727	2 min. (cc) / 5 min. (dc) 5
	EN 1276	min. (dc)
	EN 13697	5 min. (dc)
	EN 14561	5 min. (cc and dc)
Pretraugu (1)(2)	EN 1661512i	2 min. (dc)
	EN 13624	5 min. (cc and dc)
	EN 1650	5 min. (dc)
	EN 13697	5 min. (dc)
	EN 14562	5 min. (cc) / 10 min. (dc)
Fungicīds (1)	EN 13624	5 min. (cc) / 10 min. (dc)
	EN 14562	5 min. (cc) / 10 min. (dc)
Virucidāls (1)	EN 14476 Murine Norovirus	2 min. (cc) and 5 min. (dc)
	EN 14476 Adenovirus	5 min. (cc) and 10 min. (dc)
	EN 14476 Poliovirus	5 min. (cc) and 10 min. (dc)
	EN 14476 Activeon Rotavirus	10 min. (dc)
Tuberkulocidāls (1)	EN 14348 Mycobacterium terrae	5 min. (cc) and 10 min. (dc)
	EN 14563 Mycobacterium terrae	5 min. (cc)
Mycobaktericidāls (1)	EN 14348 Mycobacterium avium	10 min. (cc)
Sporicidāls (1)	EN 17126 Bacillus subtilis	10 min. (cc)
	EN 17126 Bacillus cereus	15 min. (cc)
	EN 13704 Clostridium difficile	15 min. (dc)

*Standarti, kas realizēti tīros apstākļos (CC) un netīros apstākļos (DC)

(1) Impregnētā šķīduma darbība

(2) Impregnētās salvetes darbība

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Skatīt (DDL 2311)

RAKSTURLIELUMI

- Baltas, neaustas salvetes
- pH impregnētajam šķīdumam: 7

SASTĀVS

- Etanola/izopropanola maisījums
- Amfoteriskā virsmaktīvā viela
- Alkilamīns hidrospirta šķīdumā
- Palīgvielas

IEPAKOJUMS

Kastē 12 bundžas, kurās 150 salvetes..... ref. 23120L



Bīstams produkts - Ievērojiet lietošanas piesardzības pasākumus. Pirms lietošanas izlasiet etiķeti un informāciju par produktu. Medicīnas ierīces Klase IIb.