

# VIRO'WIPES

SALVETES, PIESŪCINĀTAS AR SPORICĪDU  
MAZGĀŠANAS UN DEZINFEKCIJAS ŠĶĪDUMU

MD TREATMENT



WIPES



## ■ PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS

- Aktīvs no 2 min. (EN16615)
- Medicīnisko ierīču tīrīšana un dezinfekcija
- Augsta līmeņa dezinfekcijas aktivitāte\* (impregnētajam šķīdumam)
- Saskarē ar pārtiku eso'do virsmu tīrīšana un dezinfekcija
- Aktīvs uz *Clostridium Difficile* (impregnētajam šķīdumam)
- Nesatur QAS

QUATERNARY  
AMMONIUM  
FREE

*\*See disinfectant properties on the back*

**Fb** **Franklab®**  
notre expertise l'Ultra-Propreté

lietošanai  
gatavas

MANUAL  
TREATMENT

**CE**  
**0459**



www.sterofrango.com

# VIRO'WIPES

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

### 1 pirms pirmās lietošanas:

- noņemiet vāku un aizsargplombu
- ievietojiet pirmo salveti no rullīša centra caur vāka padeves dozatoru.

### Lietošana:

- 1- Izmantojot jaunu salveti, rūpīgi notīriet un dezinficējiet nepieciešamo virsmu.
- 2- Saskates laiks: ievērojiet kontakta laiku atbilstoši nepieciešamajai pretmikrobu aktivitātei
- 3- Neskalot\*
- \* izņemot, ja ir saskare ar ādu vai gļotādu.
- 4- Aizveriet vāku pēc katras lietošanas reizes

## DEZINFEKCIJAS ĪPAŠĪBAS

| Aktivitāte                   | Standarts                                                                                              | Kontakta laiks*                                                                                             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Baktericidāls (1)(2)</b>  | EN 1661512i<br>EN 13727<br>EN 1276<br>EN 13697<br>EN 14561                                             | 2 min. (dc)<br>2 min. (cc)/ 5 min. (dc) 5 min. (dc)<br>5 min. (dc)<br>5 min. (cc and dc)                    |
| <b>Pretraugu (1)(2)</b>      | EN 1661512i<br>EN 13624<br>EN 1650<br>EN 13697<br>EN 14562                                             | 2 min. (dc)<br>5 min. (cc and dc)<br>5 min. (dc)<br>5 min. (dc)<br>5 min. (cc) / 10 min. (dc)               |
| <b>Fungicīds (1)</b>         | EN 13624<br>EN 14562                                                                                   | 5 min. (cc) / 10 min. (dc)<br>5 min. (cc) / 10 min. (dc)                                                    |
| <b>Virucidāls (1)</b>        | EN 14476 Murine Norovirus<br>EN 14476 Adenovirus<br>EN 14476 Poliovirus<br>EN 14476 Activeon Rotavirus | 2 min. (cc) and 5 min. (dc)<br>5 min. (cc) and 10 min. (dc)<br>5 min. (cc) and 10 min. (dc)<br>10 min. (dc) |
| <b>Tuberkulocidāls (1)</b>   | EN 14348 Mycobacterium terrae<br>EN 14563 Mycobacterium terrae                                         | 5 min. (cc) and 10 min. (dc)<br>5 min. (cc)                                                                 |
| <b>Mycobaktericidāls (1)</b> | EN 14348 Mycobacterium avium                                                                           | 10 min. (cc)                                                                                                |
| <b>Sporicidāls (1)</b>       | EN 17126 Bacillus subtilis<br>EN 17126 Bacillus cereus<br>EN 13704 Clostridium difficile               | 10 min. (cc)<br>15 min. (cc)<br>15 min. (dc)                                                                |

\*Standarti, kas realizēti tiros apstākļos (CC) un netiros apstākļos (DC)

(1) Impregnētā šķīduma darbība

(2) Impregnētās salvetes darbība

## PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Skatīt (DDL 231L)

## RAKSTURLIELUMI

- Baltas, neaustas salvetes 18x20 cm
- pH impregnētajam šķīdumam: 7

## SASTĀVS

- Etanola 44%/ izopropanola maisījums 20%
- Amfoteriskā virsmaktīvā viela
- Alkilamīns hidrospirta šķīdumā
- Palīgvielas

## IEPAKOJUMS

Kastē 12 bundžas, kurās 150 salvetes..... ref. **23120L**



Bistams produkts - Ievērojiet lietošanas piesardzības pasākumus. Pirms lietošanas izlasiet etiķeti un informāciju par produktu. Medicīnas ierīces Klase IIb.