

ARĪKOJUMU TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA ZOBĀRSTNIECĪBĀ

DENTASEPT® Special Rotative

URBJU, ROTĀCIJAS UN KANĀLU INSTRUMENTU, PEDIKĪRA INSTRUMENTU MAZGĀŠANA UN DEZINFEKCIJA

- Lietošanai gatavs
- Saderīgs ar daudziem materiāliem, tostarp niķeli, titānu, volframa karbīdu, alumīniju utt.
- Iedarbības laiks: 5 minūtes (baktericīdā un raugus iznīcinoša)
- Izcila efektivitāte - apvalkoto vīrusu inaktivizācija 15 minūtēs (1)
- Var lietot ultraskaņas tīrītājos



(1) Roberta Koha institūts iesaka izmantot dezinfekcijas līdzekļus ar ierobežotu vīrusu iznīcināšanas darbību, lai pārtrauktu inficēšanās ķēdi. Saskaņā ar definīciju ierobežota vīrusu iznīcināšanas darbība (efektīva attiecībā uz apvalkoti vīrusiem atbilst aktivitātei Vakcīnija vīrusu un BVDV.

DENTASEPT® Special Rotative

URBJU, ROTĀCIJAS UN KANĀLU INSTRUMENTU,
PEDIKĪRA INSTRUMENTU MAZGĀŠANA UN
DEZINFEKCIJA

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS


- caurspīdīgs bezkrāsains šķidrums
- Blīvums: 1,00 pie 20°C
- Nelietota produkta pH vērtība: 8,1

LIETOŠANAS PROTOKOLS

Pirms lietošanas: Uzvelciet aizsargcimdus




1. Ielejiet Dentasept Special Rotative dezinfekcijas traukā. Nepieļaujiet atšķaidīšanu.

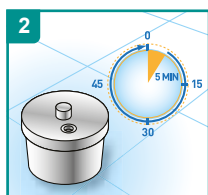

2. Pilnībā iegremdējiet rīkus šķīdumā, pārklājiet ar vāku. Atstājiet uz ieteicamo iedarbības laiku: vismaz 5 minūtes (baktericīda un rauga nogalināšanas iedarbība), ieteicams 15 minūtes (iedarbība uz apvalkotajiem vīrusiem).



3. Izņemiet rīkus no šķīduma. Rūpīgi noskalojiet medicīniskos izstrādājumus ar dzeramo ūdeni, lai noņemtu visa veida atlikumus un organiskās netīrumus.

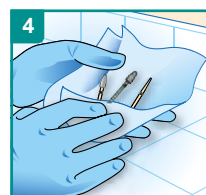

4. Atbilstoši izžāvēt instrumentus un tos sagatavot sterilizācijai.

Lai saglabātu produkta efektivitāti, darba šķīdumu jānomaina katru reizi, kad tas ir redzami piesārņots, tomēr ne retāk kā reizi dienā.

Mikrobioloģisko pētījumu rezultāti

SPEKTRS	LAIKS
Baktericīds EN 13727/EN 14561	5 min
Raugus iznīcinošs EN 13624/EN 14562	5 min
Tuberkulocīds EN 14348/EN 14563	60 min
Vīrusu iznīcināšanas darbība uz apvalka vīrusiem EN 14476/EN 17111	15 min

pētījumi netīros apstākļos

IETAKOJUMS

PRODUKT	TILPUMS	KODS
Dentasept Special Rotative	1 x 2 l kanna	3099260



D.M.D.
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Izplatītājs: SIA "Medilink",
Višķu iela 2, k-1, Rīga,
LV-1063, +37167840380,
www.medicinaspreces.lv

Gatavs lietošanai preparāts urbju, rotējošo instrumentu un kanālu mazgāšanai un dezinfekcijai pirms to sterilizācijas.

Rīcības veids

Gatavs lietošanai šķīdums.

1. Ielejiet Dentasept Special Rotative dezinfekcijas vannā. Nepieļaujiet atšķaidīšanu.
2. Pilnībā iegremdējiet rīkus šķīdumā, pārklājiet ar vāku. Atstājiet uz ieteicamo iedarbības laiku: minimāli 5 minūtes (baktericīda un rauga nogalināšanas iedarbība), ieteicams 15 minūtes (iedarbība uz apvalkotajiem vīrusiem).
3. Izņemiet rīkus no šķīduma. Rūpīgi izskalojiet medicīniskos izstrādājumus ar dzeramā ūdens kvalitātes ūdeni, lai noņemtu visus sagataves un organiskos netīrumus..
4. Atbilstoši izžāvēt instrumentus un sagatavot tos sterilizācijai.

Lai saglabātu produkta efektivitāti, darba šķīdumu jānomaina katru reizi, kad tas ir redzami piesārņots, tomēr ne retāk kā reizi dienā.

SASTĀVS

N,N-didecila-N,N-dimetilamona sārmains un hidroģēnkarbonāts, nejoniskie virsmas aktīvie savienojumi, kompleksveida savienojums, aromatizējošās vielas, krāsviela un palīgvielas.

UZGLABĀŠANA

Bīstamība – jāievēro piesardzības pasākumu noteikumi (sagatavoti saskaņā ar spēkā esošajiem ES noteikumiem par ķīmisko produktu klasificēšanu un marķēšanu). Uzglabāt temperatūrā no +5°C līdz +25°C.

DOKUMENTĀCIJA

Medicīnas ierīce, klase IIb.
Dokumentācija pieejama pēc pieprasījuma.

Medicīnas precī lietot droši

Iepazīsties ar informāciju, kas norādīta produkta etiķetē.



IZMANTOŠANA TĪKAI
PROFESIONĀLIEM MĒRĶIEM.



www.anios.com