



MEDISEPT

Perfekta dezinfekcija



MEDISEPT sausās salvetes

Sausās salvetes dezinfekcijai ar dezinfekcijas/tīrīšanas līdzekli

MEDISEPT sausās salvetes ir paredzētas mērcēšanai ar lietošanai gatavu līdzekli vai koncentrāta lietderīgo šķīdumu ar ūdeni. Izstrādāts dažādu neinvazīvu medicīnas ierīču virsmu tīrīšanai un dezinfekcijai. Salvetes var izmantot veselības aprūpes iestādēs, operācijās, pansionātos un citās vietās atbilstoši mērcēšanas līdzekļa paredzētajam lietojumam.

Funkcijas un priekšrocības, izmantojot salvetes mērcēšanai:

- Porainā salvešu struktūra ar blīvumu 55 g / m2 lieliski absorbē līdzekli un garantē tā ideālo sadalījumu uz notīrītās virsmas.
- Biezā neaustā drāna nesaskrāpē virsmu.
- Baltas salvetes bez putekļiem un neplūksnām.
- Ļoti izturīgs un izturīgs pret mazgāšanas līdzekļiem un šķīdinātājiem.
- Ieteicamā mērcēšana: 1 litrs uz spaini ļauj efektīvi dezinficēt 2 m2 lielu virsmu ar vienu salveti.
- Salvetes izmērs ir 17 x 30 cm.
- Optimālais salvešu skaits (100 gab.) ļauj tos efektīvi izmantot līdz 30 dienām (šķīduma uzglabāšanas laiks).
- Perforētas salvetes ir viegli atdalīt un izvilkēt no spaiņa.
- Ciešais folija iesaiņojums aizsargā salvetes pret mitrumu un piesārņojumu.
- Izturīgo un cieto atkārtoti lietojamo spaini ir viegli demontēt un notīrīt.
- Parocīgais spainis ļauj to ērti nēsāt darba laikā.
- Ciešais kausa vāks pasargā izmērcētās salvetes no izžūšanas un šķīduma izlīšanas pārvietošanās laikā.



Sausās salvetes
100 gab.



Mazām un lielām
virsmām



Izturīgs un ērts spainis


MEDISEPT sausās salvetes

Lietošanas virziens:

Sagatavojiet mērcēšanas šķidrumu saskaņā ar ieteikumiem uz produkta etiķetes. Lai salvetes iemērtu šķidrumā, izpildiet norādījumus, kā parādīts zemāk esošajās piktogrammās. Noslaukiet virsmu ar mitru salveti un atstājiet to nožūt uz laiku, ko iesaka mērcēšanas šķidruma ražotājs. Pirms atkārtotas lietošanas ar mērcēšanas šķidrumu notīriet spaini un vāku. Izmantojot ar šķidrumā samērcētas salvetes, nav nepieciešami aizsargcimdi.




1 Atveriet spaiņa vāku.
Izsaiņojiet rulli no folijas (izmetiet foliju).

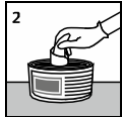


2 Izvelciet pirmo salveti no rullja iekšpuses.
Izvelciet caur atvērumu vākā.



3 Piepildiet spaini ar izvēlēto tīrīšanas /
dezinfekcijas līdzekļa šķidruma
vēlamo koncentrāciju vai ar lietošanai gatavu
produktu. Ziepju šķidruma daudzums: 1 litrs.

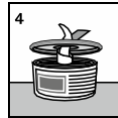

4 Aizveriet spaini un vāka atveri.
Atstāj uz 30 minūtēm, lai salvetes pilnībā
uzsūktos.

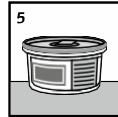

5 Aizpildiet uzlīmi uz spaiņa.
Izmantojot papildievietotāju,
uzlieciet uzlīmi uz spaiņa.

Uzglabāšana:

Salvetes uzglabāt oriģinālajā iepakojumā cieši noslēgtā spainī 5°C - 25°C temperatūrā. Sargāt no mitruma un saules gaismas. Pēc mērcēšanas uzglabāt līdz 30 dienām.

Neausto materiāla sastāvs:	polipropilēns (50%), celuloze (50%)
Salvešu blīvums:	55 g/m ²
Salvešu izmērs:	17 x 30 cm
Spaiņa materiāls:	HDPE ar augstu izturību pret ķīmikālijām

Iepakojuma vienības:

- spainis ar salvetēm mērcēšanai, 100 gab., EAN 5907626638035
- rezerves ieliktnis spainim, 100 gab., EAN 5907626638059

Produkti, kurus ieteicams lietot kopā ar MEDISEPT sausajām salvetēm:

Velox Spray neutral
Velox Spray tea tonic
Velox Top AF neutral
Velox Top AF grapefruit
Velox Foam Extra
Quatrades Extra
Quatrades Forte



Medicīnisko ierīču II klase Likuma par medicīnas ierīcēm izpratnē.
Spainis nav medicīnas ierīce.



Ražotājs:

MEDISEPT Sp. z o.o.
Konopnica 159 c
Konopnica 159 c
21-030 Motycz, Polija

tālr.: +48 81 535 22 22
export@medisept.pl
www.medisept.pl

Pārskatīts : 09.2020