

## PERFEKTAN® ACTIVE



PROTECT

Pulverveida koncentrāts instrumentu dezinfekcijai

Ļoti saudzīgs pret apstrādājamo materiālu\*

Ātra dezinfekcija pateicoties efektīvai oksidatīvai sistēmai

Pilnībā šķīstošs

\* pārbaudīts uz parastajiem metāliem, elastomēriem un termoplastiem medicīnas ierīcēs



PERFEKTAN®  
ACTIVE

PROTECT

## PRODUKTA APRAKSTS

**PERFEKTAN ACTIVE** ir ļoti efektīvs\* pulverveida koncentrāts medicīnas instrumentu un rigido un lokano endoskopa dezinfekcijai. Produkts ir pulverveida, kas ātri un pilnībā izšķīst ūdenī, ērtai un drošai lietošanai. Balstoties uz aktīvo vielu peretiķskābi, kas veidojas viegli sārmainā vidē, sasniedz plašāko mikrobioloģisko iedarbības spektru\*\* vienlaicīgi esot

saudzīgam pret apstrādājamo virsmu\*, pat pret jutīgiem materiāliem kā piem. silikons.

Pateicoties **PERFEKTAN ACTIVE** oksidatīvai sistēmai, tas nodrošina efektīvu dezinfekciju ar peretiķskābes palīdzību, kas pilnībā reaģē uz ūdeni, etiķskābi un skābekli.

\* pārbaudīts uz parastajiem metāliem, elastomēriem un termoplastiem medicīnas ierīcēs

\*\*baktericīda, levurocīda, tuberkulocīda (m. terrae), sporicīda (C.difficile), virucīda, mikobaktericīda (M.terrae, M.avium)

## PIELIETOJUMS

## Pielietojums

Manuālai medicīnas instrumentu (ķirurģisko instrumentu, anestēzijas materiālu) un rigido un lokano endoskopa dezinfekcijai.

## Lietošana

Dezinfekcijai imersijas vannās. Pagatavot darba šķīdumu saskaņā ar dozēšanas norādījumiem, izmantojot ūdeni temperatūrā <30°C. Intensīvi maisot izšķīdināt ūdenī. Darba šķīdums ir gatavs lietošanai pēc 15min, kad ir izveidojusies aktīvā viela peretiķskābe. Pēc iedarbības laika beigām, rūpīgi noskalot apstrādātās virsmas ar sterilu ūdeni un nožāvēt tās.

Saskaņā ar ES Medicīnas ierīču regulu, lietotājiem/ pacientiem ir obligāti jāziņo ražotājam un tās ES dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā lietotājs/pacients ir reģistrēts, par jebkuru nopietnu incidentu, kas noticis saistībā ar ierīci.

## Lietošanas norādījumi

Darba šķīdums jāatjauno uzreiz pie redzama piesārņojuma vai vismaz reizi dienā (max 24 stundas). PERFECTAM ACTIVE nedrīkst jaukt kopā ar citām apstrādes ķīmijām.

Virucīdai medicīnas instrumentu dezinfekcijai: pēc manuālas tīrīšanas, noskalot instrumentus ar ūdeni. Pēdējai dezinfekcijai ievietot instrumentus PERFECTAN ACTIVE darba šķīdumā tā, lai visas virsmas un dobumi ir nosegti ar darba šķīdumu. Pēc iedarbības laika beigām izņemt instrumentus no darba šķīduma un rūpīgi noskalot ar pietiekamu daudzumu ūdens, nožāvēt un sterilizēt, ja nepieciešams. Apstrādes procesā ievērot ražotāja instrukcijas un nacionālās vadlīnijas.

Endoskopa apstrādei: pēc apstrādes ar neplūksnājošu salveti notīrīt redzamos netīrumus, pēc tam pilnībā iegremdēt PLURAZYME EXTRA vai INTRU PLUS darba šķīdumā un tīrīt mehāniski. Nodrošināt, lai visas virsmas un dobumi būtu pilnībā iemērkti darba šķīdumā, izvairoties no gaisa burbuļiem. Ievērot personāla aizsardzības prasības un ierīces ražotāja apstrādes

rekomendācijas. Pēc apstrādes rūpīgi noskalot ar ūdeni un pilnībā iemērkēt PERFECTAN ACTIVE darba šķīdumā pēdējai dezinfekcijas fāzei.

Nodrošināt ka visas virsmas un dobumi ar pilnībā iemērkti darba šķīdumā un ka visi kanāli ir piepildīti ar darba šķīdumu un tas brīvi plūst pa tiem. Ievērot, lai norādītais iedarbības laiks, darba šķīduma koncentrācija un ražotāja rekomendācijas manuālai apstrādei atbilst DIN EN ISO 17664. Pēc apstrādes laika beigām noskalot rūpīgi ar sterilu ūdeni un nožāvēt.

| Šķīdums | Izmantotais daudzums | 1% | 2% | 3%  |
|---------|----------------------|----|----|-----|
| 4 litri | Mērkarote (20g)      | 2x | 4x | 6x  |
|         | Maisiņš (40g)        | 1x | 2x | 3x  |
| 8 litri | Mērkarote (20g)      | 4x | 8x | 12x |
|         | Maisiņš (40g)        | 2x | 4x | 6x  |

## Sastāvs

Aktīvā viela: peretiķskābe (*in-situ*) >850 ppm (1% šķīdums) ūdeņraža peroksīds

## Materiālu saderība

ir ļoti saudzīgs pret apstrādājamo materiālu; tas ir piemērots stikla, metāla, plastmasas (piem. PS, ABS, PVC), elastomēru (piem. PU un EPDM) apstrādei. Saderība ar anodizētu alumīniju un lateksu ir ierobežota. PERFECTAN ACTIVE nav piemērots alumīnija, vara, misiņa un polikarbonāta (PC) apstrādei.

## Piesardzības un bīstamības ziņojumi

Var pastiprināt uguni; oksidētājs. Rada nopietnus acu bojājumus. Turēt nost no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem uzliesmošanas avotiem. Nesmēķēt. Veiciet visus piesardzības pasākumus, lai izvairītos no sajaukšanas ar degošām vielām. Vilkēt aizsarg cimdus/ aizsargapģērbu/ aizsargbrilles/ sejas aizsargu. SASKARĒ AR ĀDU: skalot ar lielu

**INSTRUMENTS / MANUAL REPROCESSING**

**PERFEKTAN®  
ACTIVE**



**PROTECT**

daudzumu ūdens. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja to var viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja nepieciešams meklēt medicīnisko palīdzību. Atbrīvojies no satura/ tvertnes sertificētā apsaimniekošanas uzņēmumā vai savākšanas punktā

Tikai profesionālai lietošanai atbilstošas kvalifikācijas speciālistiem saskaņā ar vietējiem regulējumiem.

Pirms lietošanas iepazīties ar informāciju uz etiķetes.

## PERFEKTAN® ACTIVE



PROTECT

### IEDARBĪBAS SPEKTRS UN LAIKS

1 min

5 min

15 min

30 min

60 min

#### Lietošanas rekomendācijas instrumentu dezinfekcijai

|                                              |                     |                          |       |       |       |
|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|-------|
| Baktericīda, levurocīda <sup>1</sup>         | VAH/EN <sup>2</sup> | Netīras virsmas          | 1 %   |       |       |
| Fungicīda (A.brasiliensis) <sup>1</sup>      | VAH/EN <sup>3</sup> | Netīras virsmas          |       | 3 %   | 2 %   |
| Tuberkulocīda (M.terrae) <sup>1</sup>        | VAH/EN <sup>4</sup> | Netīras virsmas          |       | 2 %   | 1 %   |
| Sporicīda pret C.difficile medicīnas sektorā | EN 17126            | Tīras virsmas            | 1,5 % | 1 %   | 0,5 % |
|                                              | EN 17126            | Netīras virsmas          | 1,5 % | 1 %   |       |
| Sporicīda (B.subtilis)                       | EN 17126            | Tīras un netīras virsmas |       | 2 %   | 1 %   |
| Vīrucīda                                     | EN14476,<br>EN17111 | Tīras virsmas            |       | 2 %   | 1,5 % |
|                                              |                     |                          |       | 0,5 % |       |

#### Papildus testi

|                            |          |                          |       |       |       |
|----------------------------|----------|--------------------------|-------|-------|-------|
| Baktericīda iedarbība      | EN 13727 | Tīras un netīras virsmas | 1 %   |       |       |
|                            | EN 14561 | Netīras virsmas          | 0,5 % |       |       |
| Levurocīda (C.albicans)    | EN 13624 | Tīras un netīras virsmas | 1 %   | 0,5 % |       |
|                            | EN 14562 | Netīras virsmas          | 0,5 % |       |       |
| Pret polio- vīrusu         | EN14476  | Tīras virsmas            |       | 2 %   | 1,5 % |
|                            | EN14476  | Netīras virsmas          |       | 2 %   | 0,5 % |
| Pret Noro- vīrusu (MNV)    | EN14476  | Tīras virsmas            | 0,5 % |       |       |
|                            | EN14476  | Netīras virsmas          |       | 0,5 % |       |
|                            | EN 17111 | Tīras virsmas            | 0,5 % |       |       |
| Pret Adeno- vīrusu         | EN14476  | Tīras virsmas            |       | 0,5 % |       |
|                            | EN14476  | Netīras virsmas          |       | 0,5 % |       |
|                            | EN 17111 | Tīras virsmas            | 1 %   | 0,5 % |       |
| Fungicīda (A.brasiliensis) | EN 13624 | Netīras virsmas          |       | 3 %   | 2 %   |
|                            | EN 14562 | Netīras virsmas          |       | 1,5 % | 1 %   |
| Tuberkulocīda (M.terrae)   | EN 14348 | Tīras un netīras virsmas |       | 1,5 % | 1 %   |
|                            | EN 14563 | Netīras virsmas          |       | 1,5 % | 1 %   |
| Mikobaktericīda (M.avium)  | EN 14348 | Tīras un netīras virsmas |       | 2 %   | 1,5 % |
|                            | EN14563  | Netīras virsmas          |       | 1 %   |       |

1 -ieskaitot 2. fāze 1. solis un 2. fāze 2. Solis (kvantitatīvās suspensijas tests un kvantitatīvais nesēja tests)

2- EN 13624, EN 13727, EN 14561, EN 14562

3- EN 13624

4- EN 14348, EN 14563

## INSTRUMENTS / MANUAL REPROCESSING

# PERFEKTAN® ACTIVE




PROTECT

## PASŪTĪŠANAS INFORMĀCIJA

| Produkts         | Viena vienība | Iepakojumu<br>daudzums<br>transportēšanas kastē | Saturs       | Artikuls   |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------|------------|
| PERFEKTAN ACTIVE | Spainis       | 6 x 1 KG                                        | Spainis 1 KG | 00-155-010 |

Valsts prasības var atšķirties. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar mūsu filiāli vai vietējo izplatītāju.

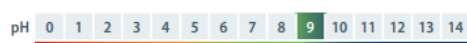

CE 0482

## SERTIFIKĀCIJA



Dr. Schumacher ir sertificēts saskaņā ar DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, viņam ir apstiprināta vides pārvaldības sistēma saskaņā ar EMAS un viņš ir IHO, VCI, BAH, DGSV un DGKH biedrs.