



MEDISEPT

Īsta dezinfekcija!



Viruton® Pre

Putas ķirurģisko instrumentu tīrīšanai un apstrādei pirms dezinfekcijas.

Lietošanai gatavas putas, ķirurģisko instrumentu tīrīšanai un priekšdezinfekcijai pirms pamata dezinfekcijas.

Produkta priekšrocības:

- Iedarbojas 15 min. laikā uz baktērijām, sēnītēm, mikobaktērijām, apvalkotajiem vīrusiem, Adeno un Poliovīrusiem.
- Instrumentu priekšdezinficēšanai pirms pamata dezinfekcijas procesa.
- Ieteicams medicīniskiem instrumentiem, ķirurģiskiem instrumentiem un instrumentu konteineriem.
- Satur korozijas inhibitorus.
- Augsta saderība ar instrumentu materiāliem.
- Ļoti labas tīrīšanas īpašības arī piekaltušu organiskas dabas atlieku gadījumā.

Ieguvumi lietotājam:

- Var izmantot daudziem jutīgiem materiāliem.
- Efektivitātes un drošas lietošanas garantija.
- Augsts infekcijas riska samazinājums.
- Efektīvi noņem nožuvušus organiskos netīrumus.
- Ekonomiska lietošana.
- Novērš organisko netīrumu nožūšanu.



Putas



Iedarbojas uz bakt.,
sēn., vīr., Tbc,
Adeno, Polio



Instrumentiem



Iedarbojas
15 min. laikā

Pielietošana:

Produkts satur korozijas inhibitorus, un tam ir ļoti laba saderība ar materiāliem, kas padara to ideāli piemērotu nerūsējošā tērauda, cinkota tērauda, alumīnija, plastmasas un gumijas instrumentiem. Produktam ir ļoti labas tīrīšanas īpašības, arī piekaltušu organiskas dabas atlieku gadījumā. Viruton Pre kavē atlikumu izkalšanu uz instrumentiem to savākšanas un transportēšanas laikā līdz atbilstošajai dezinfekcijai. Tam ir patīkams aromāts, un bakteriostatiskas un baktericīdas īpašības. Viruton Pre ir plašs biocīdais spektrs un izcilas tīrīšanas īpašības, pateicoties inovatīvai formulai, kuras pamatā ir virsmaktīvo vielu un nano-micellu tehnoloģijas sinerģija.

Iedarbības spektrs	Standarti atb. EN 14885	Netīros apstākļos
Baktērijas (t.sk. MRSA)	EN 13727	15 min.
	EN 14561	15 min.
Sēnītes (C. albicans)	EN 13624	15 min.
	EN 14562	15 min.
Mikobaktērijas (M. terrae, M. avium)	EN 14348	15 min.
	EN 14563	15 min.
Apvalkotie vīrusi (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, Ebola)	EN 14476	15 min.
Adenovīruss	EN 14476	15 min.
Poliovīruss	EN 14476	15 min.

Lietošanas metode:

Novietojiet instrumentus uzreiz pēc lietošanas uz paplātes un uzklājiet putas uz visiem elementiem. Izņemiet instrumentus pēc noteiktā laika un noskalojiet tos ar ūdeni. Ja ir redzams piesārņojums, notīriet instrumentus ar birstīti un vēlreiz noklājiet ar putām. Pēc instrumentu noskalošanas ar ūdeni, tos dezinficē vai nu manuāli, vai automātiski. Nelietojiet kopā ar citiem mazgāšanas līdzekļiem vai dezinfekcijas līdzekļiem. Lietojiet aizsargcimdus. Nelietot uz instrumentiem, kas izgatavoti no vara, misiņa un cinka. Produkts ir paredzēts profesionāliem lietotājiem.

Sastāvdaļas: 100g produkta satur:

0,15 g N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropān-1,3-diamīnu;

0,14 g Poli(oksi-1,2-etāndiil), alfa- [2-(didecilmetilamino)etil]-omega-hidroksi-, propanoātu (sāls)

Pieejamie iepakojumi:

Pudele ar DUO izsmidzinātāju, 1 L



Produkts ir IIb klases medicīnas ierīce, kas paredzēta neinvazīvai dezinfekcijai un atbilst EP direktīvai 93/42 Par medicīnas ierīcēm un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Drošības datu lapa un informācija par sastāvdaļām pieejama: www.medisept.pl

CE 2274