



MEDISEPT

Īsta dezinfekcija!



Quatrodes® Unit NF

Koncentrēts līdzeklis zobārstniecības atsūcēju tīrīšanai un dezinfekcijai

Koncentrāts ir paredzēts, lai vienlaicīgi mazgātu un dezinficētu atsūkšanas sistēmas, amalgama separatorus un zobārstniecības traukus.

Produkta priekšrocības:

- Koncentrācija no 1% 15 min. laikā
- Iedarbojas uz baktērijām sēnītēm, mikobaktērijām, apvalkotajiem vīrusiem.
- Ieteicams atsūkšanas sistēmām, zobārstniecības traukiem, amalgama separatoriem.
- Neveido putas.
- Var dezinficēt arī slēgto masāžas vannu sistēmas.
- Novērš bioplēves veidošanos.

Ieguvumi lietotājam:

- Var izmantot daudziem jutīgiem materiāliem.
- Efektivitātes un drošas lietošanas garantija.
- Augsts infekcijas riska samazinājums.
- Efektīvi noņem nožuvušus organiskos netīrumus.
- Ātrums un lietošanas ērtums.



Koncentrāts



Iedarbojas uz
bakt., sēn.,
vīr., Tbc



Zobārstniecības
nodaļām



Koncentrācija no
1% 15 min. laikā

Quatrades® Unit NF

Pielietošana:

Koncentrāts ir paredzēts, lai vienlaicīgi mazgātu un dezinficētu atsūkšanas sistēmas, amalgama separatorus un zobārstniecības traukus. Produkts neveido putas. Lietojot katru dienu, tas novērš bioplēves veidošanos. To var izmantot arī, lai dezinficētu slēgtās masāžas vannu (burbuļvannu) sistēmas, kas klasificējas kā medicīniskās ierīces. Paredzēts izmantošanai profesionāliem.

Iedarbības spektrs	Standarti atb. EN 14885	15 min.	Laiks 30 min.	60 min.
Baktērijas (t.sk. MRSA)	EN 13727	1%		
Sēnītes (C. albicans)	EN 13624	1%*		
	EN 13624	2%	1%	
Mikobaktērijas (M. Tuberculosis)	EN 14348			4%
Apvalkotie vīrusi (HBV, HIV, HCV, Ebola, Vacinnia, gripa, herpes vīruss)	EN 14476	2%		

*Tīros apstākļos

Lietojot atsūcējiem:

Izlaidiet šķīdumu cauri atsūkšanas sistēmai, atkarībā no piesārņojuma pakāpes, vienu vai divas reizes dienā. Iesūciet sistēmā visu šķīdumu, izslēdziet ierīci un atstājiet to vismaz uz 15 minūtēm, lai līdzeklis iedarbojas. Pēc dezinfekcijas izskalojiet atsūkšanas sistēmu ar ūdeni. Skalošanu var veikt pēc ieteiktā dezinfekcijas laika vai nākamajā dienā, tūlīt pēc ierīces ieslēgšanas. Nemaisiet kopā ar citiem tīrīšanas līdzekļiem vai dezinfekcijas līdzekļiem.

Lietojot masāžas vannām (burbuļvannām):

Pirms pirmās lietošanas izskalojiet vannu ar ūdeni, lai likvidētu citu līdzekļu atlikumus. Piepildiet vannu ar tīru, aukstu ūdeni tā, lai tiktu nosegtas sprauslas. Pievieno 200 ml līdzekļa uz 10 l ūdens. Ieslēdziet burbuļsistēmu uz 15 minūtēm. Pēc noteiktā iedarbības laika izlaidiet no vannas ūdeni un izskalojiet to ar tīru ūdeni. Nemaisiet kopā ar citiem līdzekļiem. Nelietojiet produktu pacienta terapeitiskās procedūras laikā

Sastāvdaļas: 100g produkta satur:

4,4 g Dimetildioktilamonija hlorīdu (CAS: 5538-94-3),
0,6 g Benzil-C12-14-alkildimetilamonija hlorīdu (CAS: 85409-22-9).

Pieejamie iepakojumi:

Pudele ar dozatoru, 1 L
Kanna, 5 L



Produkts ir II a klases medicīnas ierīce, kas paredzēta neinvazīvai dezinfekcijai un atbilst EP direktīvai 93/42 Par medicīnas ierīcēm un Līvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Drošības datu lapa un informācija par sastāvdaļām pieejama: www.medisep.pl

CE 2274

 Ražotājs:
MEDISEPT Sp. z o.o.
Konopnica 159 c
21-030 Motycz

tel.: + 48 81 535 22 22
info@medisept.pl
www.medisep.pl

Izplatītājs Latvijā: SIA „Medilink”,
Čiekurkalna 2. līnija 75, Rīga, LV-1026,
Latvija; +371 67840379;
E-pasts: medilink@medilink.lv;
www.medilink.lv

Izstrādes datums: 01.2019